

## Instructions indiquant comment remplir le liquide de refroidissement dans Cryo 21 et Arctik 21

Attention: L'équipement doit être absolument éteint.

### Insertion du tube en matière plastique dans l'insert à l'arrière de l'appareil

1. Appuyez sur le petit levier pour ouvrir le trou et insérer le tube en plastique comme indiqué.



**Attention:** il est obligatoire diriger le tube vers le bas parce que si le liquide il va sortir, il va s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil et le système électrique subira des dommages.

### Insertion de la seringue

2. Insérez la seringue dans le connecteur gauche, le plus proche du connecteur électrique, comme indiqué dans l'image.
3. Remplissez la moitié de la seringue avec le liquide fourni.



### L'insertion du liquide à l'intérieur de l'équipement

Comme illustré dans l'image, placer une gobelet en plastique au-dessous du tube.

4. Appuyez sur le piston de la seringue pour ajouter le liquide à l'intérieur de l'équipement.

Lorsque le liquide commence à s'échapper du tube en plastique signifie que le récipient à l'intérieur de l'appareil est complètement plein, donc le remplissage est terminé. Si le liquide inséré dans la seringue ne était pas suffisant, répétez l'étape précédente (3).



5. Débranchez la seringue du connecteur.
6. Débranchez le tuyau en plastique et poussez sur le bouton pour fermer l'attaque.
7. Allumez l'appareil et commencez un traitement pour vérifier le succès de remplissage du liquide dans l'appareil.