

EASY 21[®]

Massage et Vibrations

Manuel d'utilisation

Index

1	Avant de commencer	6
1.1	Notes importantes	6
1.1.1	Mises en garde	6
2	Contre-indications à l'utilisation de EASY 21	7
2.1	Effets indésirables	8
2.2	Précautions à l'attention de l'utilisateur	8
3	Description	9
3.1	Les Chakra	10
3.2	Les Fréquences	13
3.3	Appareil	13
3.4	Caractéristiques techniques	14
3.5	Données d'identification	14
3.5.1	Explication des symboles	16
3.5.2	Durée de vie de l'appareil	16
3.5.3	Types d'utilisations	17
3.6	Caractéristiques professionnelles de l'opérateur qualifié à l'utilisation de l'appareil	18
3.7	Environnement adéquat	18
3.8	Mises en garde et précautions	18
3.8.1	Précautions générales	18
3.8.2	Précautions lors de l'utilisation d'un appareil électrique	19
3.8.3	Précaution d'utilisation de Easy 21	19
3.8.4	Précautions d'entretien de l'appareil	20
3.9	Évaluations esthétiques du client	20
4	Accessoires et pièces à main	21
4.1	Description de l'utilisation de la pièce à main vacuum	21
4.2	Description de l'utilisation des pièces à main pour le traitement chaud du visage et du corps.	21
4.3	Description de l'utilisation d'écouteur	22
4.4	Description du raccordement des câbles	22
4.5	Description des cosses	22
4.6	Description des pièces à main à 5 et 7 pointes	22
4.7	Description des pièces à main pour le traitement de stimulation	23
5	Démarrage	24
5.1	Menu des Paramètres	25
5.1.1	Choix de la Langue	26
5.1.2	Test de Température	26
5.1.3	Version	26

5.2	Traitement VACUUM	27
5.3	Traitements Chackra corps	27
5.3.1	Électrodes	28
5.3.2	Poignées Pointues.....	29
5.3.3	Poignées.....	30
5.3.4	Cosses	31
5.4	Traitements Chackra visage	32
5.5	Traitement Brut Blanc	33
5.6	Traitements Ondes Acoustiques	34
5.6.1	Fréquence 396Hz	34
5.6.2	Fréquence 417 Hz	34
5.6.3	Fréquence 528Hz	34
5.6.4	Fréquence 639Hz	34
5.6.5	Fréquence 741Hz	34
5.6.6	Fréquence 852Hz	34
5.6.7	Fréquence de 1725 Hz	34
5.7	Traitements Manuel corps	36
5.7.1	Traitement Cellulite Molle	36
5.8	Traitements Manuel visage	40
5.8.1	Traitement Lifting	40
5.9	Traitements Automatique corps	44
5.9.1	Traitement Cellulite molle	44
5.10	Traitements Automatique visage	48
5.10.1	Traitement Lifting	48
5.11	Boutons communs aux soins automatiques et manuels, visage et corps	52
5.11.1	Produits cosmétiques	52
5.11.2	Tables de soins corporels.....	52
5.11.3	Tables de traitement du visage.....	53
6	Mise à jour du logiciel	54
7	Procédure d'entretien	55
7.1	Généralités	55
7.2	Précautions de sécurité	55
7.3	Tableau d'entretien préventif	55
7.4	Dépannage.....	56
7.5	Nettoyage	57
7.6	Nettoyage de l'appareil	57
7.7	Nettoyage des accessoires	58
7.8	Questions et réponses	59
8	Protocoles Easy 21	60
8.1	Automatique Visage	60
8.2	Automatique Corps	60
8.3	Exemples de position d'électrode corps	61
8.3.1	Cellulite molle - Cellulite molle - Soft Cellulite.....	61
8.3.2	Cellulite edematosa - Cellulite oedémateuse - Oedematous cellulite.....	62

8.3.3	Cellulite Compatta - Cellulite Compact - Compact Cellulite.....	63
8.4	Exemples de position d'électrode visage	64
8.4.1	Lifting	64
8.4.2	Anti Età - Anti-âge – Anti-Age	64
8.4.3	Illuminante – Eclairant – Lighting.....	64
9	Élimination de l'appareil en fin de vie	65
10	Garantie	66

1 Avant de commencer

1.1 Notes importantes

L'appareil Easy 21, ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

21 EQUIPMENT S.r.l. décline toute responsabilité dans le cas d'une utilisation inappropriée de l'appareil, par exemple:

- ✓ Utilisation par des personnes non qualifiées
- ✓ Utilisation non conforme aux méthodes mentionnées dans le manuel.
- ✓ Non-respect des précautions présentées dans le paragraphe 1.1.1

1.1.1 Mises en garde

Le manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'appareil et doit toujours se trouver à portée de main de l'utilisateur.

L'appareil doit être maintenu hors des sources de chaleur, d'étincelles et de mélanges liquides ou gazeux inflammables.

Utiliser seulement les câbles et les accessoires qui ont été fourni avec l'appareil.

Les précautions décrites dans ce manuel sont destinées à garantir une utilisation correcte et sans danger du produit et à éviter des blessures à l'utilisateur et à d'autres personnes ou des dommages matériels.

Les symboles suivants classifient et expliquent l'étendue des dangers ou dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte du produit.



Ce symbole indique des actions interdites.



Ce symbole indique les actions à effectuer obligatoirement.

2 Contre-indications à l'utilisation de EASY 21

N'utilisez **jamais** Easy 21 pour la stimulation métamérique avec les types d'appareils électro médicaux suivants.

Cela pourrait provoquer un accident, un dysfonctionnement du dispositif électro médical et causer des blessures graves.

- Dispositifs médicaux implantés, tels que les stimulateurs cardiaques.
- Dispositifs électro-médicaux utilisés comme support vital, tels que les machines cœur-poumon.
- Dispositifs médicaux portables, tels que les électrocardiographes portables.
- Prothèses métalliques / orthopédiques présentes sur la zone à traiter

AVERTISSEMENT

Ce produit ne doit pas être utilisé par les types de personnes suivants.


Cela pourrait causer des accidents ou des problèmes physiques ou cutanés.



- Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque
- Femmes enceintes ou peu après l'accouchement ou qui allaitent
- Les personnes atteintes de phlébite, de thrombophlébite ou de varices ulcérées
- Les personnes ayant des processus inflammatoires importants et des maladies graves (cancer, leucémie, maladies de la peau)
- Les personnes qui ont subi une greffe
- Personne atteinte de Cryoglobulinémie et du syndrome de Raynaud (seulement pour le traitement avec le froid)

Toute personne dans de telles conditions devrait consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des accidents ou des problèmes sur le corps ou la peau.

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Les personnes sujettes aux allergies. • Les personnes ayant des problèmes de perception ou dermatologiques (infections, inflammations cutanées ou rayures). • Les personnes avec des obstructions du flux sanguin. • Les personnes qui suivent un traitement médicamenteux. • Les personnes présentant des symptômes d'anomalies des nerfs crâniens (épilepsie, etc.). • Les personnes présentant des symptômes d'anomalies cardiaques. • Les personnes ayant des problèmes de perception dus à un trouble grave de la circulation sanguine périphérique, tel que le diabète. • Les personnes ayant de la fièvre (température de 38 ° C ou plus). |  | <ul style="list-style-type: none"> • Les personnes ayant besoin d'une récupération postopératoire. • Les personnes souffrant de conditions aiguës (douloureuses), y compris la fracture de la colonne vertébrale, les entorses, les tensions musculaires, etc. • Les personnes souffrant de maladies osseuses, telles que l'ostéoporose. • Les personnes ayant des niveaux de pression artérielle anormaux. • Les personnes ayant des anomalies physiques spécifiques. • Les personnes subissant un traitement thérapeutique dans un établissement médical. • Personnes soumises à un pontage gastrique ou à un anneau gastrique |
|--|---|---|

Même si aucune des conditions décrites ci-dessus ne s'applique à l'utilisateur, consultez votre médecin en cas de doute ou de préoccupation concernant l'utilisation du produit.

AVANT D'APPLIQUER LES MANIPULES SUR LA PEAU IL FAUT VERIFIER QU'ELLE SOIT INTACTE ET QU'ELLE NE PRESENTE AUCUNE MARQUES POUVANT REVELER LA PRESENCE D'AFFECTIONS CUTANÉES FONGIQUES, BACTÉRIENNES OU VIRALES, AFIN D'ÉVITER TOUTE CONTAMINATION.

2.1 Effets indésirables

Lors du traitement, il est possible que se manifeste chez les clients très sensibles, une légère sensation de brûlure à l'endroit de la zone traitée.

**TOUJOURS LIRE LE MANUEL AVANT L'UTILISATION
POUR LA SECURITE DE TOUS.**

2.2 Précautions à l'attention de l'utilisateur

Easy 21 doit être en parfait état de marche lors de son utilisation. Le matériel endommagé doit être remplacé afin d'éliminer tout danger pour le client ainsi que pour son utilisateur. A noter également qu'il est important d'appliquer les règles suivantes :

- ✓ Si nécessaire, protéger les petites lésions avec un sparadrap
- ✓ Nettoyer le matériel
- ✓ Désinfecter attentivement le visage ou la partie du corps qui va être traitée. Ne pas utiliser de solutions contenant de l'alcool pouvant causer des irritations
- ✓ Lors du traitement, veiller à ce que les câbles électriques soient installés correctement.

**ATTENTION: AVANT LE TRAITEMENT CON EASY 21
S'ASSURER QUE CES PRECAUTIONS SOIENT RESPECTÉES.**

3 Description

Easy 21 est VIBRATION SONORE, STIMULATION MUSCULAIRE ET MÉCANIQUE, un appareil unique en son genre dans le but de rééquilibrer, restaurer et renouveler les fonctions physiologiques du corps humain, de manière non invasive à travers des signaux connus et reconnus par le même.

Tout dans l'univers vibre. L'homme aussi est affecté par cette réalité qui se manifeste à l'extérieur et à l'intérieur de lui.

La vibration est une force vitale.

L'homme peut percevoir deux types de vibrations, la bénéfique qui ramène physiologiquement le corps humain en harmonie et la nocive, par exemple, une forte décharge de stress.

Les sollicitations de la vie et les vibrations qui en découlent ont une influence tangible sur l'état de bien-être et de santé.

La valeur de la thérapie vibratoire est connue depuis l'Antiquité. Il a été appliqué à travers les sons, les battements des objets sur le corps et les effets visuels à travers les couleurs.

Au cours de la dernière décennie, la science, par la recherche, a réussi à donner un visage à une approche thérapeutique des vibrations électriques et mécaniques avec de grands résultats positifs pour la santé humaine.

Ces deux vibrations ont ouvert les portes d'une véritable thérapie globale sur l'être humain.

QU'EST-CE QUE LA VIBRATION

Le terme «vibration» décrit un mouvement oscillatoire autour d'une position de référence à intervalles réguliers. Le nombre de cycles complets effectués pendant l'unité de temps, c'est-à-dire la seconde, est appelé fréquence.

La fréquence est mesurée en Hertz (Hz). Le Hertz définit le nombre d'oscillations (vibrations) qui se produisent en une seconde.

EFFETS POSITIFS DES VIBRATIONS SUR LE CORPS HUMAIN

Le système musculosquelettique est une machine biologique complexe pour la locomotion humaine.

Afin d'exécuter et de réaliser les différentes demandes fonctionnelles, ce système change continuellement de structure et de métabolisme, répondant à l'utilisation avec des modifications à la fois de forme et de force. Les deux systèmes sont conçus pour pouvoir résister au même niveau de tension auquel la structure osseuse est soumise.

Une "surcharge" constante (mouvement du corps) assure un stimulus biologique par des facteurs structurels et métaboliques, en maintenant les tissus, à la fois des os et des muscles, dans une limite de sécurité fonctionnelle.

Si l'on force le corps à une période de repos prolongé au lit ou d'immobilisation causée par des blessures, les structures musculaires et osseuses subissent une dégradation de la force, du soutien et de la structure protéique de manière à limiter toutes les fonctions.

La vieillesse et les maladies telles que l'ostéoporose réduisent la qualité et la quantité des structures osseuses et musculaires avec une atrophie musculaire et un déséquilibre osseux associés.

Il a été démontré que des exercices de courte durée, mais de très haute intensité, produisent des effets positifs sur les structures osseuses-musculaires et articulaires; à tel point que la masse et la résistance sont maintenues à un niveau élevé en réponse à ces contraintes cycliques.

Cependant, les humains sont généralement sédentaires, surtout s'ils vieillissent. Et, souvent, son activité physique se réduit à une simple locomotion pour les fonctions quotidiennes normales.

Malheureusement, le concept moderne de la vie limite considérablement l'activité de mouvement, ce qui a un effet négatif sur le système musculosquelettique.

Easy 21 a été conçu avec des fréquences de différents types conçues pour satisfaire à la fois le manque de mouvement dérivé de la vie moderne et certains aspects esthétiques qui sont mis en évidence par le manque d'activité physique ou les déséquilibres dérivés de fonctions physiologiques non optimales de tout l'organisme. en particulier du système neuro-musculo-squelettique.

Easy 21 c'est aussi la chaleur

L'appareil exploite les propriétés de la chaleur pour lutter contre les imperfections de la cellulite et de la relaxation cutanée et en même temps enveloppe le client d'une chaleureuse étreinte de bien-être alternée avec une vibration vitalisant.

L'action thermique immédiate, entraînant une augmentation de l'activité enzymatique et métabolique, favorise la lyse et favorise l'activité contractile musculaire.

L'équipement est équipé d'une série de programmes innovants qui combinent différentes séquences de traitement utilisant différentes technologies.

Les capillaires, l'hypoderme, le derme et les muscles augmentent leur état grâce à l'élimination des résidus métaboliques et du stress accumulé.

Easy 21 est aussi Visage

En élevant la température du tissu conjonctif existant et en activant les fibroblastes pour produire du nouveau collagène et de la nouvelle élastine, Easy 21 a un effet tout à fait naturel de compactage et de détente des tissus et permet de réduire les rides et les signes de vieillissement, rajeunissant le visage.

De plus, toutes les techniques incluses dans Easy 21 nous permettent de stimuler les processus d'œdème positif, en puisant l'eau des couches plus profondes de l'hypoderme afin d'augmenter la prolifération des fibroblastes, cellules fondamentales pour la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique.

3.1 Les Chakra



256 Hz

Premier chakra: Muladhar ACTIVATOR

Le premier chakra est situé à la base de la colonne vertébrale, à la hauteur du sacrum.

L'énergie de ce chakra est associée aux glandes surrénales et est responsable de la santé des jambes, des pieds, du système osseux, de l'anus, du rectum, du gros intestin et du coccyx. Cela correspond à la satisfaction du besoin de survie, de stabilité, de nourriture

Un blocage du premier chakra pourrait se manifester par un sentiment d'insécurité, une faible confiance en soi, de l'apathie, une inquiétude excessive et la peur de perdre ce qui nous donne la sécurité et un sentiment de bien-être.

L'organe de correspondance sont les glandes surrénales



288 Hz

Deuxième chakra: Svadhithana DRAINANT

En sanskrit, Svadhithana signifie «doux». C'est le chakra sacré, situé à la hauteur des organes génitaux. L'énergie de ce chakra est associée aux gonades (ovaires pour femmes, testicules pour hommes) et est responsable de la santé des organes génitaux, des reins, de la vessie, de la prostate, du système circulatoire, des dents et des os.

Un blocage du deuxième chakra pourrait se manifester par une fermeture vers la «sensualité» de la vie, générant une sorte de difficulté à vivre des états de joie, de jalousie, de peurs, de désirs insatisfaits et obsessionnels, l'impuissance et la frigidité peuvent être la manifestation d'un blocage de cette énergie.



320 Hz

Troisième chakra: Manipura NORMALISER

Manipura peut être traduit par «ville du joyau», et est le chakra du plexus solaire, situé au niveau du nombril. Ce chakra représente l'individualité et la perception de soi.

C'est le siège de la détermination, de la volonté, du pouvoir personnel et de la confiance en soi.

La glande endocrine associée à ce chakra est le pancréas, responsable des processus digestifs, car il régule les fonctions de l'estomac, du foie, de la rate et de la vésicule biliaire.

Si le chakra du plexus solaire fonctionne mal, vous pouvez avoir des problèmes tels que l'excès de poids dans l'abdomen, les maladies digestives, l'acidité, les ulcères, la dépendance aux stimulants, la fatigue chronique, l'égoïsme, l'insatisfaction personnelle, l'infériorité, la culpabilité, la dépendance au pouvoir, l'égoïsme, etc.



341,3 Hz

Quatrième chakra: Anahata FORTIFIANT

Anahata est le chakra du cœur et représente le centre de tout le système énergétique des chakras.

Anahata relie les trois centres inférieurs, plus liés aux aspects matériels, aux trois chakras supérieurs, de type plus mental et spirituel, liés à l'intuition et à la pensée.

Les conséquences du dysfonctionnement du chakra du cœur sont l'incapacité d'aimer, les maladies respiratoires et cardiaques, l'égoïsme, la déconnexion et l'isolement.

La glande endocrine associée à ce chakra est le thymus, et ce centre énergétique régule les activités des poumons, du cœur, des systèmes circulatoire et respiratoire.



384 Hz

Cinquième chakra: Vishuddha OXYGÉNANT

Vishuddha est le nom sanscrit du chakra de la gorge et signifie «pur».

Un dysfonctionnement de ce chakra peut entraîner des problèmes de voix, de gorge, de cordes vocales, de communication, un dysfonctionnement de la glande thyroïde et le besoin de beaucoup parler, ou au contraire la peur de parler pour éviter les problèmes.

L'organe de correspondance est la thyroïde. Il est situé au centre du cou, à la base de la gorge. C'est la source de la communication et de la voix. Son fonctionnement nourrit le système lymphatique, l'œsophage, la gorge, la trachée, les épaules, les bras et les mains. C'est le lien entre l'esprit et le reste du corps.



426 Hz

Sixième chakra: Ajna REGULATOR

Le sixième chakra est situé au centre du front; son nom sanskrit est Ajna, cela signifie connaître, percevoir et aussi commander, dans le sens d'avoir le commandement sur notre esprit.

Lorsque le chakra est déficient, il est difficile de faire confiance à son intuition, de se concentrer ou de se souvenir des choses.

Elle peut se manifester comme un excès de rationalité, qui détermine la difficulté de voir et d'imaginer la réalité d'une manière différente de la façon dont elle est perçue.

Le chakra du troisième œil est associé à l'hypophyse, la glande utilisée pour contrôler le système hormonal. Les parties du corps qui lui sont associées sont le cervelet, le système nerveux, le système hormonal, les yeux, les oreilles, le nez et les sinus paranasaux



480 Hz

Septième chakra: Sahasrara RÉÉQUILIBRANT

Le septième chakra, ou «chakra de la couronne», est situé sur le dessus du crâne et signifie «mille fois».

Une fermeture ou un manque de Sahasrara implique un obstacle au flux d'énergie le long du chemin de la conscience et se manifeste par une difficulté d'apprentissage et de concentration, ou avec un sentiment de fermeture et d'hostilité envers de nouvelles informations ou points de vue.

Le chakra de la couronne est associé à la glande pinéale, un centre qui, dans notre corps, régule le rythme veille-sommeil, faim-soif et la température corporelle, tout en stimulant l'hypophyse pour produire des hormones.

3.2 Les Fréquences

Bruit Blanc: caractérisé par l'absence de périodicité dans le temps et par l'amplitude sur tout le spectre de fréquences, il constitue une barrière aux autres sons.

Particulièrement adapté aux problèmes de TINNESS ou INSOMNIA

La fréquence 396Hz est particulièrement adaptée pour soulager l'esprit de l'oppression et de l'anxiété.

La fréquence 417 Hz est particulièrement adaptée pour stimuler le changement et abandonner le passé.

La fréquence 528Hz est particulièrement adaptée à la restauration et à l'harmonisation de l'individu.

La fréquence 639Hz est particulièrement adaptée pour stimuler l'ouverture dans les relations humaines.

La fréquence 741Hz est particulièrement adaptée à l'éveil intérieur.

La fréquence 852Hz est particulièrement adaptée pour revenir à l'ordre spirituel.

La fréquence de 1725 Hz stimule la glande pituitaire et ses fonctions.

Cette glande est le pivot de l'horloge interne, elle régule les rythmes Circadiens-sommeil/éveil-fatigue et manque de lucidité, l'hormone mélatonine responsable de cette régulation.

Métabolisme osseux : des recherches menées sur des souris ont suggéré que des changements dans la fonction de la glande pinéale pourrait affecter le métabolisme osseux.

Les femmes ménopausées sont nettement plus vulnérables à l'ostéoporose : cela pourrait être dû au fait que l'efficacité de la glande pinéale a tendance à diminuer avec l'âge.

Easy 21 a dans sa programmation toutes ces fréquences, tant au niveau audio que physique sous forme de stimulation musculaire, les deux stimulations combinées nous permettent de synchroniser et d'augmenter les effets bénéfiques sur le niveau psycho-physique de la personne.

3.3 Appareil

EASY 21 contient :








- N.01 Pièce à main avec 5 pointes pour le traitement de rides ou vergetures
- N.01 Pièce à main avec 7 pointes pour le traitement de rides ou vergetures
- N. 02 Pièce à main de stimulation pour le traitement de stimulation manuelle ou automatique
- N. 01 Pièce à main VACUUM pour favoriser la micro circulation sanguine et lymphatique
- N. 01 Pièce à main visage chaud pour le traitement de massage visage
- N. 01 Pièce à main corps chaud pour le traitement de massage corps
- N. 01 Paire de cosses pour le traitement des vibrations, stimulation visage et corps
- N. 01 Ecouteurs pour audio fréquences
- N.04 Câbles bipolaires pour les traitements de stimulation automatique du visage et du corps
- N. 01 Câble d'alimentation

3.4 Caractéristiques techniques








Alimentation	110-240 V
Puissance absorbée	100 VA
Fréquence	50-60 Hz
Fusible de protection	2x2 AT
Tension de sortie maximale	150 V
Courant de sortie maximale	50 mA
Fonctionnement de l'appareil	Température : de 10 ° C à 40 ° C Humidité : humidité relative de 30% à 75% (sans condensation) Pression atmosphérique : 700 hPa ±1060 hPa
Stockage	Température : de -40 ° C à 70 ° C Humidité : humidité relative de 10% à 100% (sans condensation) Pression atmosphérique : 500 hPa ±1060 hPa
Classe de sécurité	Classe I tipo BF
Display	TFT 7" TOUCH-SCREEN
Type d'appareil	Appareil pour le traitement Massage et Vibrations

3.5 Données d'identification








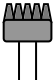

Les données d'identification de l'équipement Easy 21 sont contenues sur la plaque d'identification placée à proximité du câble d'alimentation.

 21 Equipment S.r.l. P.za G. Bodoni, 3	Voltage 110 - 240 Volt
 2020	Frequency 50 - 60 Hz
MODEL EASY 21	Power 100 VA
SN ESY-XX-0000	Fuse 2 X 2 AT
Codice UDI	DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I PER TRATTAMENTI ESTETICI
    	

La plaque montre les données suivantes :

	NOM ET ADRESSE DU FABRICANT	
	ANNÉE DE PRODUCTION	
MODEL	MODÈLE D'ÉQUIPEMENT	
	NUMÉRO DE SÉRIE	
Voltage	ALIMENTATION	
Frequency	FRÉQUENCE	
Power	ABSORPTION	
Fuse	FUSIBLES	
	LISEZ ATTENTIVEMENT LA DOCUMENTATION CI-JOINT	
	LIRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION CI-JOINT	
	MARQUAGE CE	
	AVIS DE COLLECTE SÉPARÉE POUR L'APPAREIL DE FIN DE VIE	
Codice UDI	CODE À BARRES, QUI IDENTIFIE UNIQUEMENT TEL APPAREIL	
DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE I POUR TRAITEMENTS ESTHÉTIQUES		DESCRIPTION DU TYPE D'ÉQUIPEMENT

3.5.1 Explication des symboles

	FERMÉ (CONNECTÉ AU SECTEUR)
	OUVERT (NON CONNECTÉ AU SECTEUR)
	APPAREIL DE TYPE BF (norme EN 60601-1)
	CONNECTEUR POUR LA CONNEXION DES PIÈCES À MAIN POUR LE TRAITEMENT À CHAUD
	CONNECTEUR POUR LA CONNEXION DE LA PIÈCE À MAIN POUR LE TRAITEMENT VACUUM
	CONNECTEUR POUR RACCORDER DES CASQUES POUR LE TRAITEMENT DU SON AUDIO
	CONNECTEUR POUR LA CONNEXION DES COSSES POUR LE TRAITEMENT DES VIBRATIONS
	CONNECTEUR POUR FIXER LES PIÈCES À MAIN POINTÉES POUR LE TRAITEMENT DES RIDES ET DES VERGETURES
	CONNECTEURS POUR LA CONNEXION DES PIÈCES À MAIN LCD ET AVEC BOUTONS POUR LE TRAITEMENT MANUEL DES VIBRATIONS
1-2 3-4 5-6 7-8	CONNECTEURS POUR LA CONNEXION DES CÂBLES DES VIBRATIONS AUTOMATIQUE

**L'ENDOMMAGEMENT, LE DEPLACEMENT OU L'ALTERATION DE L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DOIT ÊTRE IMMÉDIATEMENT SIGNALÉ AU PRODUCTEUR, AU CENTRE D'ASSISTANCE AUTORISÉ OU AU DÉTAILLANT.
LA GARANTIE N'A AUCUNE VALEUR SI L'ÉTIQUETTE EST ENDOMMAGÉE.
SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT OU PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR ÉVITER TOUT DANGER.**

3.5.2 Durée de vie de l'appareil

L'appareil a une durée de vie de 10 ans. Passé ce laps de temps, les parties internes électriques deviennent trop vieilles et ne garantissent plus un travail optimal.

3.5.3 Types d'utilisations

3.5.3.1 Principaux effets du traitement avec la pièce à main VACUUM:

Particulièrement utilisé pour :

Obtenir un léger décollement de la peau du tissu conjonctif sous-jacent, cette action nous permet une plus grande circulation sanguine de la partie traitée par conséquent une plus grande oxygénation favorisant l'action des cosmétiques et accessoires qui seront utilisés après.

3.5.3.2 Principaux effets du traitement avec des pièces à main de stimulation (LCD et boutons)

Particulièrement utilisé pour:

Obtenir une vibration en dosant la puissance et la durée.

Permettent d'obtenir plus de tonicité et d'harmonie du corps en stimulant localement la partie du corps la plus touchée par l'imperfection

3.5.3.3 Principaux effets du traitement de la pièce à main chaude (visage et corps)

Particulièrement utilisé pour :

L'action thermique immédiate, avec une augmentation conséquente de l'activité enzymatique et métabolique, favorise la lyse locale, la transformation et la métabolisation des graisses, consommées comme source d'énergie pour l'activité contractile des muscles.

3.5.3.4 Principaux effets du traitement avec pièces à main pointues (5 ou 7 pointes)

Particulièrement utilisé pour :

Pour les traitements des rides et des vergetures, grâce à leurs points particuliers, ils permettent de réveiller la zone touchée par les imperfections précitées, en donnant un fouetter de vibrations de manière sélective et précise, contribuant ainsi à la régénération cutanée et au comblement naturel de l'imperfection traitée.

3.5.3.5 Principaux effets du traitement des écouteurs

Particulièrement utilisé pour :

Écouter les différentes fréquences sonores à la fois dans les traitements Chakra et dans les fréquences du bien-être général

3.5.3.6 Principaux effets du traitement de vibro stimulation

Particulièrement utilisé pour :

pour tous les traitements automatiques du visage et du corps. Traitements Cellulite, Lifting, Anti-Âge, Éclairant et Chakra

En résumé, voici les différentes fonctions de l'appareil Easy 21:

- Stimulation de la microcirculation.
- Activation de l'élimination localisée de la Cellulite.
- Tonification dermique et remodelage cutané et musculaire
- Rétablissement des fonctions métaboliques cellulaires, avec augmentation des fonctions reproductives.
- Restauration et équilibre des activités corporelles.
- Harmonisation des fonctions corporelles.
- Régénération cutanée.
- Oxygénation accrue.
- Bien-être psycho-physique.

3.6 Caractéristiques professionnelles de l'opérateur qualifié à l'utilisation de l'appareil

L'opérateur doit satisfaire aux exigences demandées par la loi en cours.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes de plus de 18 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience, seulement si correctement supervisées ou instruites pour utiliser le dispositif en toute sécurité et avec la prise de conscience des risques associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

L'utilisation de ce dispositif est réservée aux personnes qui ont suivi le cours de formation (chez le fabricant ou chez un distributeur agréé) et qui ont obtenu le certificat.

3.7 Environnement adéquat

L'appareil doit être utilisé dans un espace adéquat, adapté aux traitements esthétiques. Les locaux dans lesquels l'appareil est utilisé, doivent être équipés d'un système électrique conforme à la législation nationale.

Il est conseillé, si ce n'est pas déjà spécifié par la loi du pays dans lequel l'appareil est utilisé, d'équiper les locaux des fonctionnalités suivantes:

- Équipotentialité dans la zone du sujet traité
- Interrupteur différentiel de type A ou B
- Alimentation et lumières de sécurité

3.8 Mises en garde et précautions

3.8.1 Précautions générales

Les instructions contenues dans ce manuel font partie intégrante de l'appareil et doivent rester disponibles à tout moment pour le personnel.

Toutes les instructions de sécurité ou de précautions d'emplois doivent être transmises et fournies avec l'appareil si il est transféré à d'autres personnes.

Lire toutes les précautions et les mises en garde avant d'utiliser l'appareil; bien que celui-ci ait été conçu selon les mesures de sécurité actuellement en cours, son utilisation correcte et appropriée est la meilleure garantie de sécurité.

Pensez à suivre les règles décrites dans le manuel pour la sécurité de toutes les personnes présentes dans l'espace où l'appareil est utilisé.

Ce système doit être utilisé exclusivement par le personnel ayant été spécialement formé et capable de gérer correctement le système. La sécurité électrique de l'appareil est assurée uniquement lorsqu'il est correctement connecté à l'implantation de mise à la terre conformément aux normes de sécurité en cours (Italie CEI64-4 ou plus récemment CEI 64-8).

Il faut vérifier ce détail fondamental de sécurité et en cas de doute demander un contrôle attentif de l'installation par un personnel qualifié.

Le producteur de l'appareil ne peut pas être considéré responsable des dommages possibles dus au manque d'une mise à la terre efficace de l'installation. L'opération sans la mise à la terre protectrice est interdite. Avant de brancher les appareils, vérifiez que la tension nécessaire (indiquée sur l'étiquette d'identification) corresponde au réseau effectif.

L'appareil ne doit pas être utilisé en condition environnementale au-delà des limites indiquées dans le paragraphe « Caractéristiques techniques».

3.8.2 Précautions lors de l'utilisation d'un appareil électrique

L'utilisation de tout appareil électrique nécessite l'observation de quelques règles fondamentales, en particulier :

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou pieds humides ou mouillés.
- Ne pas utiliser l'appareil à pieds nus.
- Ne pas laisser l'appareil allumé inutilement. Il faut l'éteindre quand il n'est pas utilisé et à la fin de chaque traitement.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des lieux où il pourrait être mouillé.
- Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit. Cette action pourrait provoquer des accidents ou des blessures.
- Ne laissez pas tomber le produit ou le frapper ou le soumettre à un fort impact.
- N'utilisez pas le produit en combinaison avec d'autres appareils ou dispositifs électriques pour l'esthétique. L'utilisateur peut se sentir malade ou ressentir un sentiment de nausée.
- Si possible, évitez d'utiliser des adaptateurs multiprises ou des rallonges. Si l'utilisation était essentielle, vérifiez que:
 1. Qu'ils sont conformes (vérifiez qu'il existe un marquage, tel que CE).
 2. Vérifiez qu'ils ont les exigences d'alimentation appropriées et qu'ils ont la forme correcte pour les prises utilisées.
 3. Ils sont équipés d'une connexion à la terre.

3.8.3 Précaution d'utilisation de Easy 21

LIRE ATTENTIVEMENT LES CONTRE-INDICATIONS (PARTIE 2) ET LES EFFETS INDESIRABLES (PARTIE 2.1) CONTENUS DANS CE MANUEL.

Attention: Nous ne garantissons pas les résultats obtenus si l'appareil n'est pas utilisé avec notre ligne de cosmétiques conçue spécialement pour l'utilisation de la machine.

Avant d'actionner l'interrupteur général, il faut vérifier que les prises de ventilation d'air ne soient ni partiellement ni totalement obstruées et que les pièces à main sont connectées à l'équipement. **Ne jamais actionner l'interrupteur principal sans la pièce à main pour le traitement par le froid, afin de ne pas endommager l'équipement!**

Lors de l'utilisation de l'appareil, il est nécessaire que l'opérateur tienne compte des précautions suivantes:

- Enlever tous les obstacles susceptibles de réduire la visibilité du panneau frontal
- Ne pas se fier aux témoins lumineux. Un voyant éteint ne certifie pas que l'appareil ne soit pas sous tension. Le filament pourrait être brûlé.
- Il faut éviter l'utilisation d'autres appareils branchés au même moment sur le client durant le traitement.
- Ne pas effectuer de traitements aux travers des vêtements ou tissus.
- Enlever tous type de matériel conducteur dans la zone qui va être traitée.
- Ne pas traiter les zones qui contiennent des implants, à l'exception de prothèses et/ou implantations dentaires.
- Enlever les appareils acoustiques.
- Enlever tous les métaux (bijoux, montres, boucles d'oreilles, etc.) des clients avant le traitement.
- Dans le cas où l'appareil entre en mode protection et s'arrête, il faut l'éteindre, le rallumer et sélectionner à nouveau le programme.

- Un produit cosmétique doit toujours être utilisé sous la pièce à main répartie uniformément sur la zone à traiter
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de substances anesthésiques, gazeuses, ou liquides inflammables.
- Eviter que tous type de liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil, et ne jamais le plonger dans l'eau. Avant de le nettoyer, il faut l'éteindre et le détacher du réseau électrique. Ne pas stériliser les dispositifs et les accessoires.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Tout autre utilisation doit être considérée comme inappropriée et dangereuse.
- Le producteur ne peut pas être considéré responsable d'éventuels dégâts dus à une utilisation inappropriée, erronée ou déraisonnable.
- Modifier ou essayer de modifier des parties de l'appareil est considéré comme dangereux.
- Avant d'effectuer n'importe quelle opération de nettoyage, il faut détacher l'appareil du réseau électrique ou éteindre l'interrupteur général.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, il faut l'éteindre immédiatement. Concernant d'éventuelles réparations se référer uniquement au centre d'assistance autorisé et demander des pièces de rechange originales. Ne pas observer ces règles peut compromettre la sécurité des appareils et peut être dangereux pour l'utilisateur.

3.8.4 Précautions d'entretien de l'appareil


L'assistant technique ne doit jamais effectuer d'interventions à l'intérieur de l'appareil sans la présence d'une autre personne qui puisse éventuellement lui porter secours.

3.9 Évaluations esthétiques du client

Effectuez une évaluation esthétique avant, pendant et à la fin de chaque traitement.

- Évaluation esthétique générale du client.
- Informations sur l'état général de santé.
- Vérifiez l'absence des symptômes cutanés dû aux infections et/ou dermatites d'origine inflammatoire ou infectieuse.
- Évaluations péri métriques, impédancémetrique et photographique sur les parties du corps qui sont à traiter.

4 Accessoires et pièces à main

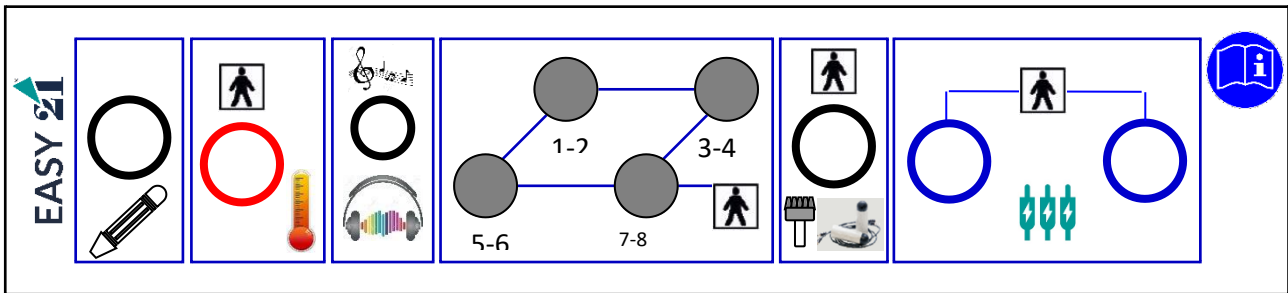

4.1 Description de l'utilisation de la pièce à main vacuum



Symbol de référence

Toujours connecter la pièce à main à l'appareil avant de commencer un traitement, dans le connecteur de référence en appliquant une légère pression

L'appareil doit être strictement éteint!

Remarque: pour un nettoyage et une hygiène corrects, il est recommandé de changer le filtre à vide à chaque traitement. À la fin de chaque traitement, nettoyez toujours soigneusement la pièce à main.

Pour déconnecter la pièce à main, appuyez sur la languette métallique et retirez le connecteur de connexion. Remettez la pièce à main en faisant très attention.

4.2 Description de l'utilisation des pièces à main pour le traitement chaud du visage et du corps



Symbol de référence

La pièce à main avec la plus grande surface rectangulaire doit être utilisée uniquement pour les traitements corporels.

La pièce à main avec la plus petite surface rectangulaire doit être utilisée pour les traitements du visage et du cou.

Connectez toujours l'une des deux pièces à main à l'appareil avant de commencer un traitement, dans le connecteur de référence. Assurez-vous que vous avez vissé fermement le connecteur vers la droite.

L'appareil doit être strictement éteint!

Il n'y a qu'une seule prise de connexion pour les deux pièces à main; il n'est donc pas possible de les utiliser ensemble en même temps.

En revanche, les pièces à main comportent une partie plate en aluminium qui doit être utilisée au contact de la peau, après application du produit cosmétique proposé.

Remarque: pour un nettoyage et une hygiène appropriés, il est recommandé de toujours appliquer la gaine de protection en plastique fournie avec l'équipement. À la fin de chaque traitement, nettoyez toujours soigneusement la pièce à main et éliminez tous les résidus de crème sur la surface et sur le tube.

Pour déconnecter la pièce à main, dévissez le connecteur vers la gauche.

Remettez la pièce à main en faisant très attention.

4.3 Description de l'utilisation d'écouteur



Symbol de référence

Connectez le casque à l'appareil avant de commencer un traitement, dans le connecteur de référence en appliquant une légère pression

L'appareil doit être strictement éteint!

Remarque: à la fin de chaque traitement, nettoyez toujours soigneusement les écouteurs.
Pour déconnecter le casque, appuyez sur le levier rouge et tirez doucement sur le connecteur.
Rangez les écouteurs en faisant très attention.

4.4 Description du raccordement des câbles

Connectez les câbles aux connecteurs de référence marqués des numéros 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.
Assurez-vous d'avoir serré les 4 connecteurs vers la droite
Pour déconnecter les câbles, dévissez les connecteurs vers la gauche.

4.5 Description des cosses



Symbol de référence

Connecter les cosses à l'appareil avant de commencer un traitement, dans le connecteur de référence en appliquant une légère pression

L'appareil doit être strictement éteint!

Remarque: à la fin de chaque traitement, nettoyez toujours scrupuleusement les cosses.
Pour déconnecter les cosses, appuyez sur le levier au-dessus du connecteur et tirez doucement.
Remettez les cosses en place en faisant très attention.

4.6 Description des pièces à main à 5 et 7 pointes



Symbol de référence

La pièce à main à 7 pointes doit être utilisée pour les vergetures sur le corps.
La pièce à main à 5 pointes doit être utilisée pour les rides du visage et du cou
Toujours connecter l'une des deux pièces à main à l'appareil avant de commencer un traitement, dans le connecteur de référence

L'appareil doit être strictement éteint!

Remarque : à la fin de chaque traitement, nettoyez toujours soigneusement la pièce à main et éliminez tous les résidus de crème sur la surface et sur le câble.

Pour déconnecter la pièce à main, appuyez sur le levier au-dessus du connecteur et tirez doucement.

Rangez les pièces à main en faisant très attention.

4.7 Description des pièces à main pour le traitement de stimulation



Symbol de référence

Les pièces à main doivent être utilisées exclusivement pour les traitements sur le corps.

Connectez les deux câbles gris dans l'insert sur le panneau frontal de l'appareil mis en évidence par le symbole ci-dessous. Assurez-vous que vous entendez un "clac" lorsque vous branchez le câble.

La connexion des deux pièces à main dans les deux connecteurs sur le panneau est indifférente.

L'appareil doit être strictement éteint!

Remarque : Pour que le traitement soit activé, il est nécessaire d'augmenter la puissance avec le bouton noir placé sur l'une des deux pièces à main. Utilisez le bouton rouge pour baisser le courant.

Note: pendant le traitement de stimulation, assurez-vous que le produit cosmétique n'entre pas en contact avec les étiquettes qui couvrent l'écran et les boutons des deux pièces à main, afin d'éviter tout endommagement de la structure moléculaire de celle-ci.


À la fin de chaque traitement, après la procédure de nettoyage, placez les pièces à main en faisant très attention dans le deuxième ou troisième insert en haut (les plus étroites), situés sur les côtés du panneau frontal de l'appareil.

5 Démarrage

Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton qui se situe à l'arrière droit de celui-ci.

NOTE: Il est nécessaire de toujours connecter la pièce à main pour le traitement par le froid avant d'allumer l'équipement!

Après l'allumage, l'écran tactile se calibre et après les deux écrans initiaux, l'application démarre (environ 10 secondes) et l'écran principal apparaît.

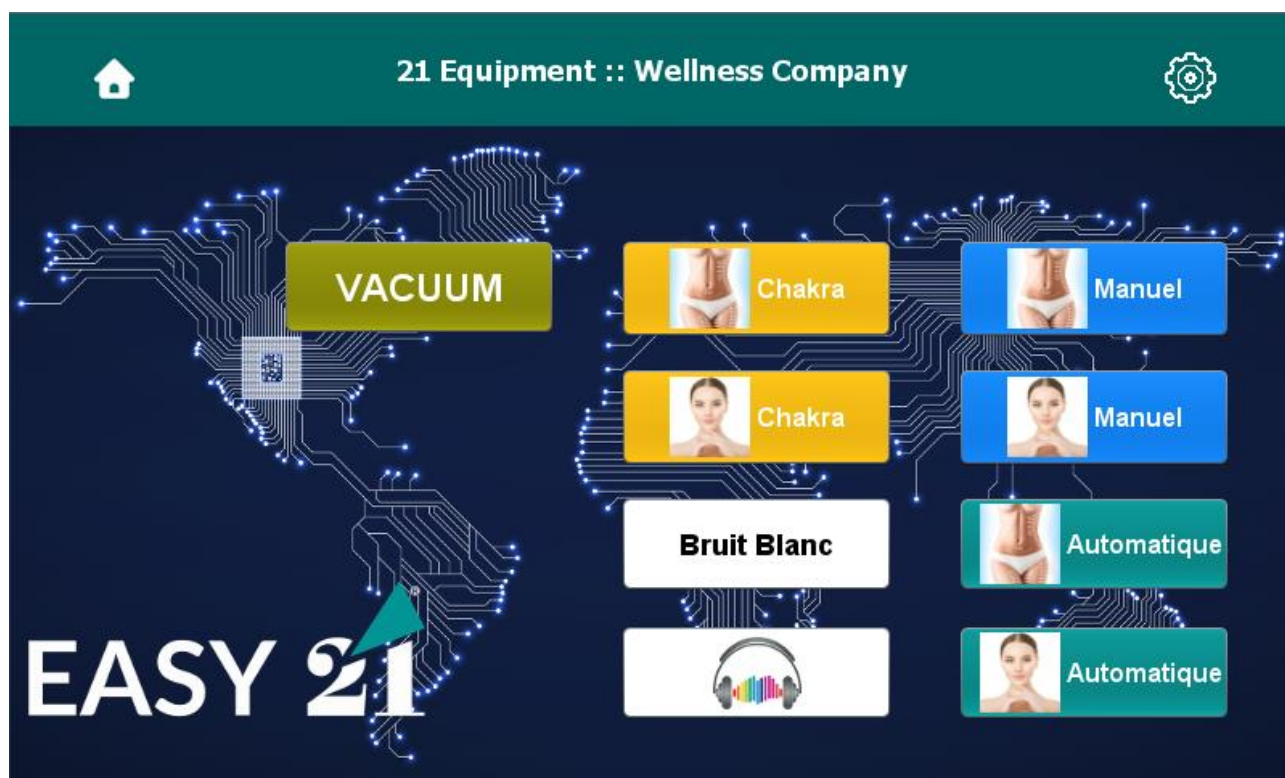

L'écran est divisé en deux parties :

PARTIE HAUTE

Caractérisé par les touches de l'écran tactile mises en évidence par les icônes ci-dessous:



Appuyez sur ce symbole pour toujours revenir à l'écran initial



En appuyant sur ce symbole, vous accédez au menu qui vous permet de définir la langue

PARTIE INFÉRIEURE

Caractérisé par les touches de l'écran tactile mises en évidence par les icônes ci-dessous

VACUUM

Chackra Corps

Chackra Visage

Bruit blanc

Ecouteurs

Manuel corps

Manuel visage


Automatique corps

Automatique visage

Toucher l'une de ces icônes active le traitement associé

5.1 Menu des Paramètres

Appuyez sur l'écran tactile sur le bouton "Paramètres" en haut à droite, l'écran suivant apparaît

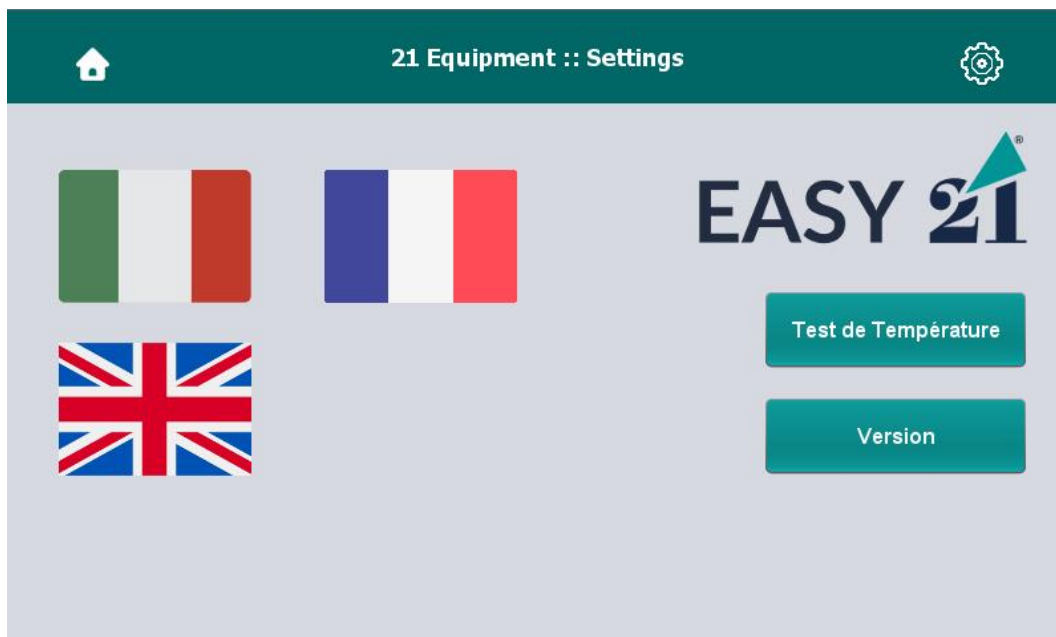


5.1.1 Choix de la Langue

Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône du drapeau, correspondant à la langue souhaitée
Pour revenir au menu de sélection de traitement, appuyez sur l'icône Accueil en haut à gauche

5.1.2 Test de Température

Touchez l'écran tactile sur l'icône Test de température, l'écran suivant s'ouvre:

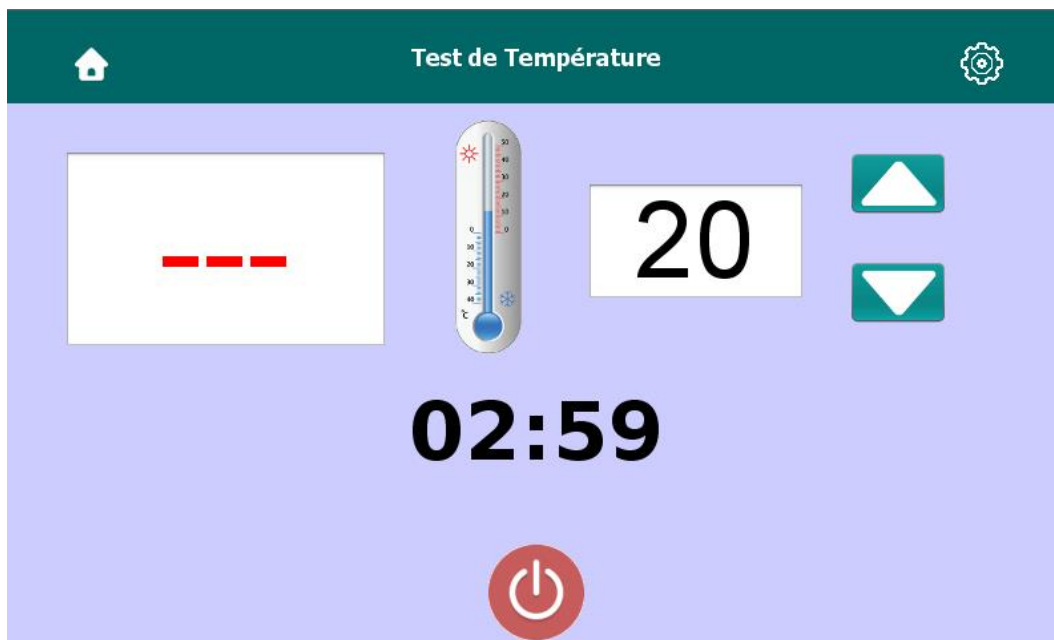

Réglez la température à évaluer avec les flèches haut / bas.

L'écran affiche deux températures, celle en rouge est la température momentanée de la pièce à main qui monte progressivement, celle en noir est la température TEST.


Cette fonction vous permet également d'effectuer un traitement thermique uniquement pour une durée de 30 minutes.

5.1.3 Version

Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Version pour connaître la version du logiciel installé sur l'appareil

5.2 Traitement VACUUM

Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône VACUUM, l'écran suivant s'ouvre:

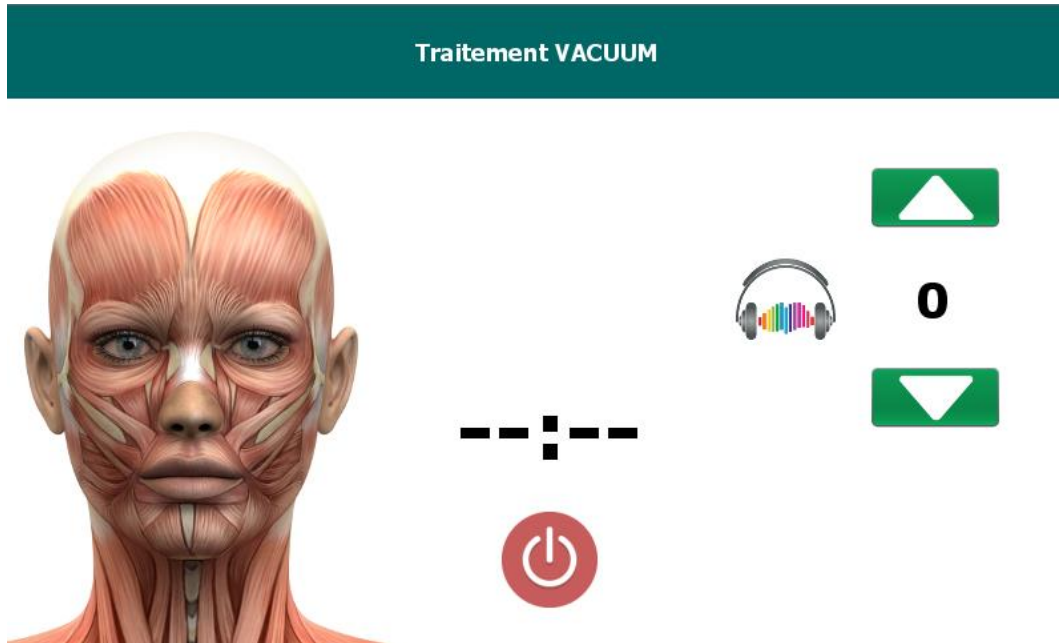

Demandez au client de porter les écouteurs.

Réglez le volume avec les flèches haut / bas, vous verrez le nombre changer entre les flèches elles-mêmes.


Appuyez la poignée sur la peau et la déplacer de bas en haut, nous permet d'avoir une légère augmentation de la circulation sanguine et d'oxygéner la peau, en favorisant le nettoyage et en suivant une meilleure pénétration des produits cosmétiques.

À la fin du traitement, l'appareil revient à l'écran d'accueil

5.3 Traitements Chackra corps


Il est recommandé d'effectuer 3 cycles de traitements Chackra à la fois.

Ils peuvent être mélangés en changeant l'effet désiré ou en renforçant le même effet en changeant l'accessoire utilisé. Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Chackra corps, l'écran suivant s'ouvre:

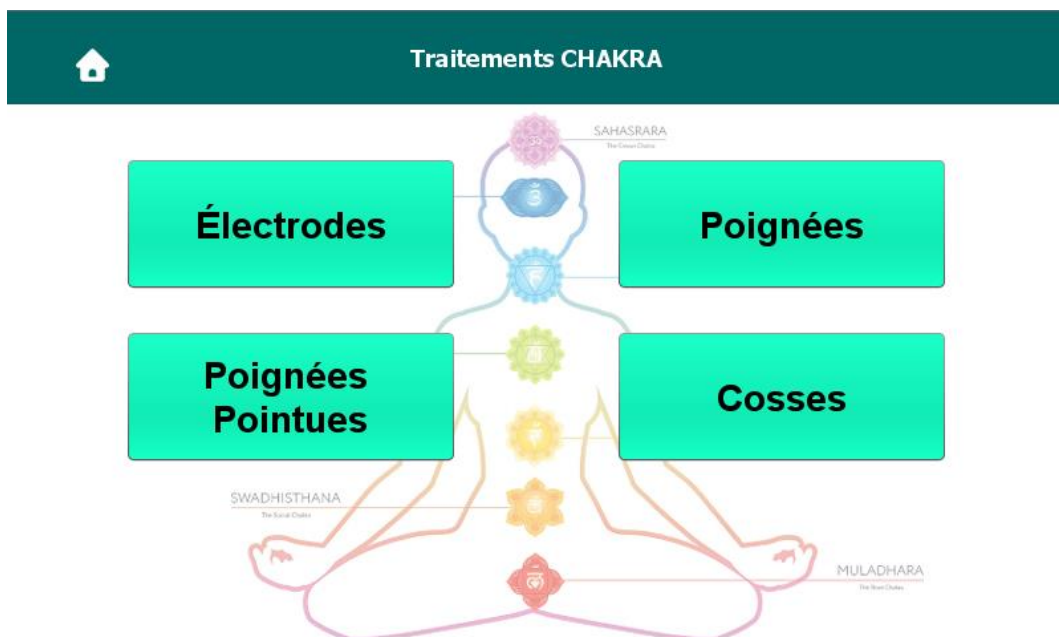

5.3.1 Électrodes


Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Électrodes, l'écran suivant s'ouvre :
Positionner les électrodes en fonction du problème à traiter, voir 8.3 Exemples de position d'électrode.
Connectez les électrodes aux câbles.

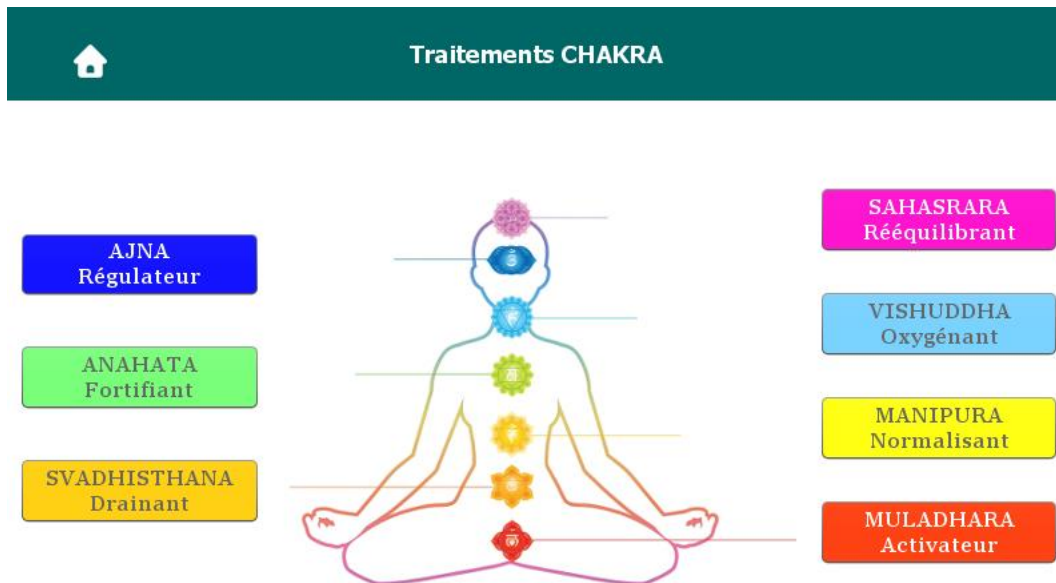

Choisissez le traitement le plus adapté au problème esthétique rencontré parmi ceux à l'écran.

5.3.1.1 AJNA [Régulateur]

Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône ANJA [Régulateur], l'écran suivant s'ouvre :

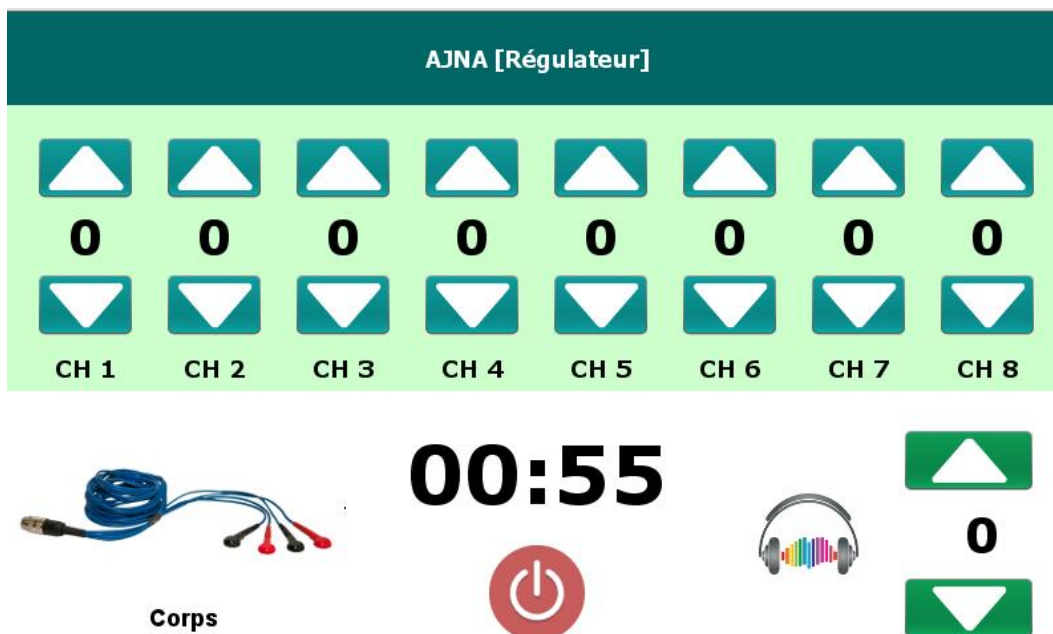

Demandez au client de porter les écouteurs.


Réglez le volume avec les flèches haut / bas, vous verrez le nombre changer entre les flèches elles-mêmes.
Le bruit / son doit être agréable.

Ajustez la stimulation, canal par canal, avec les flèches haut / bas
À la fin du temps de traitement, l'appareil s'éteint automatiquement

5.3.2 Poignées Pointues


Vérifier que les pièces à main avec embouts sont connectées

Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Poignées Pointues, l'écran suivant s'ouvre :

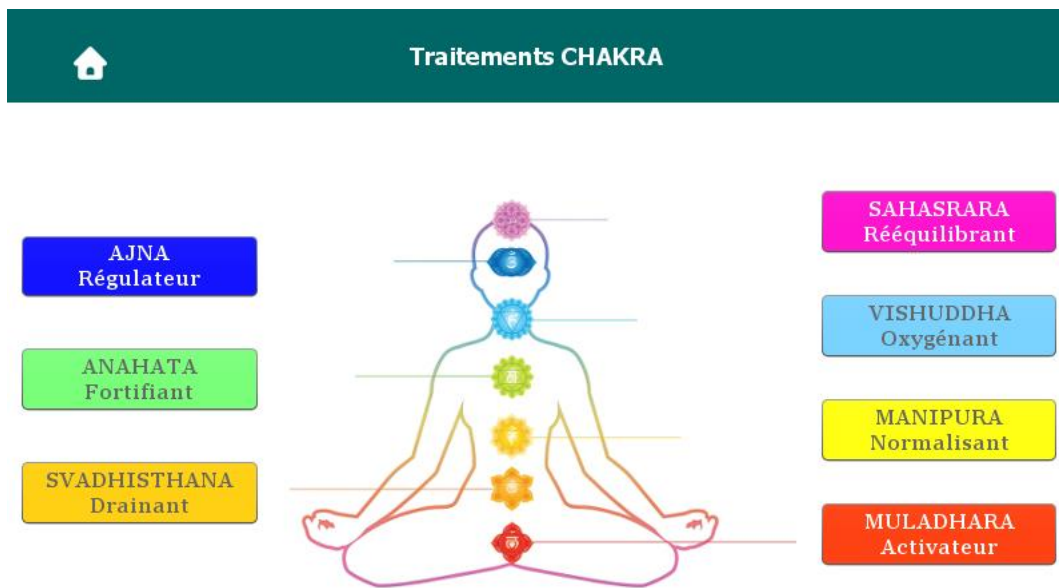

Choisissez le traitement le plus adapté au problème esthétique rencontré parmi ceux à l'écran.

5.3.2.1 AJNA [Régulateur]

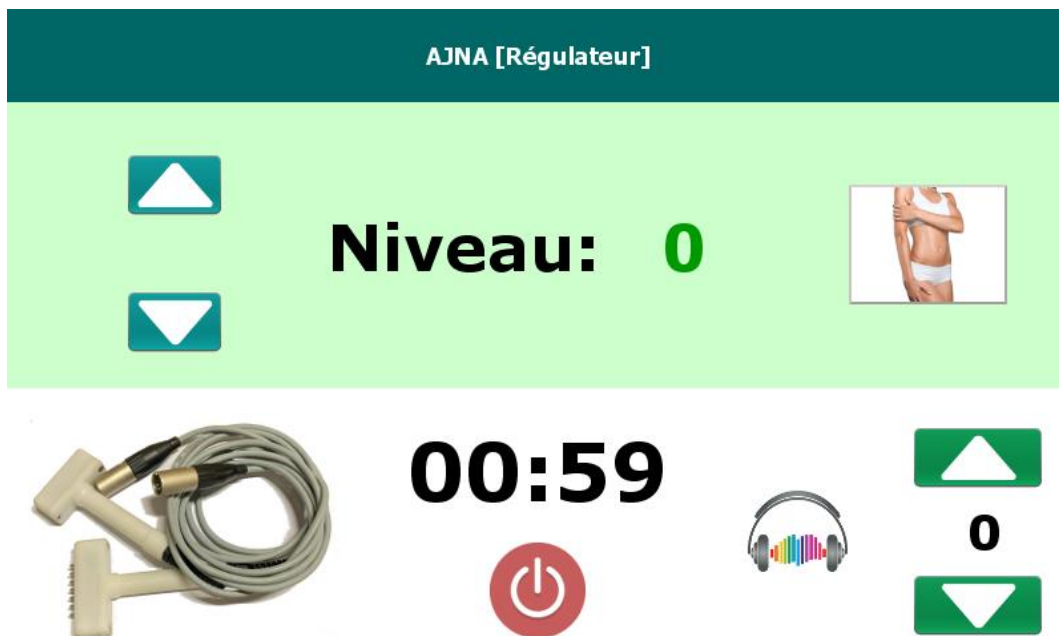

Demandez au client de porter les écouteurs.

Réglez le volume avec les flèches haut / bas, vous verrez le nombre changer entre les flèches elles-mêmes.

Le bruit / son doit être agréable.

Ces pièces à main sont utilisées en cas de :

Relaxations musculaires


Relaxations de la peau

Appliquer le cosmétique le plus adapté sur la pièce, placer les pièces à main sur la peau du client, augmenter la puissance grâce au bouton noir de la pièce à main à deux boutons (noir et rouge) et commencer à travailler précisément sur la partie à traiter.

À la fin du temps de traitement, l'appareil s'éteint automatiquement


5.3.3 Poignées

Vérifier que les pièces à main avec embouts sont connectées
Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Poignées , l'écran suivant s'ouvre :

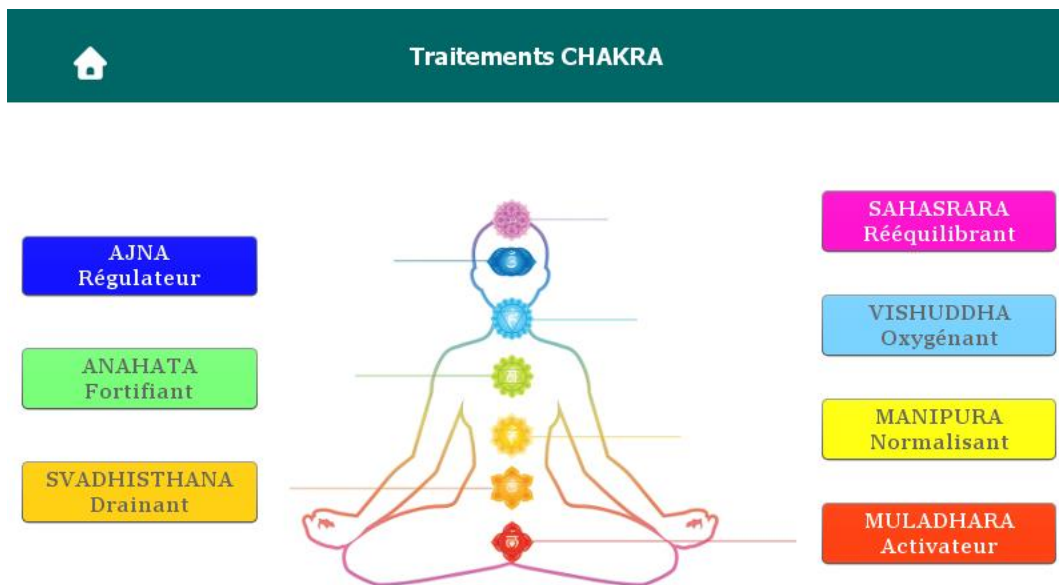

Choisissez le traitement le plus adapté au problème esthétique rencontré parmi ceux à l'écran

5.3.3.1 AJNA [Régulateur]

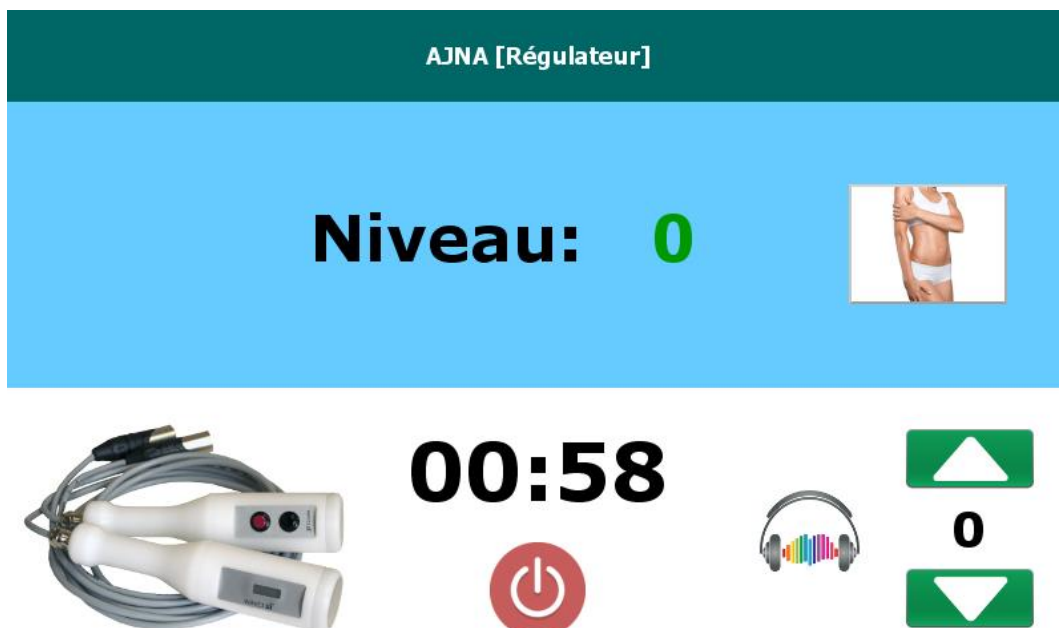

Demandez au client de porter les écouteurs.

Réglez le volume avec les flèches haut / bas, vous verrez le nombre changer entre les flèches elles-mêmes.
Le bruit / son doit être agréable.

Ces pièces à main sont utilisées en cas de :

Relaxations musculaires

Relaxations de la peau


Appliquer le cosmétique le plus adapté sur la pièce, placer les pièces à main sur la peau du client, augmenter la puissance grâce au bouton noir de la pièce à main à deux boutons (noir et rouge) et commencer à travailler précisément sur la partie à traiter.

À la fin du temps de traitement, l'appareil s'éteint automatiquement

5.3.4 Cosses


Vérifier que les pièces à main avec embouts sont connectées

Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Cosses , l'écran suivant s'ouvre :

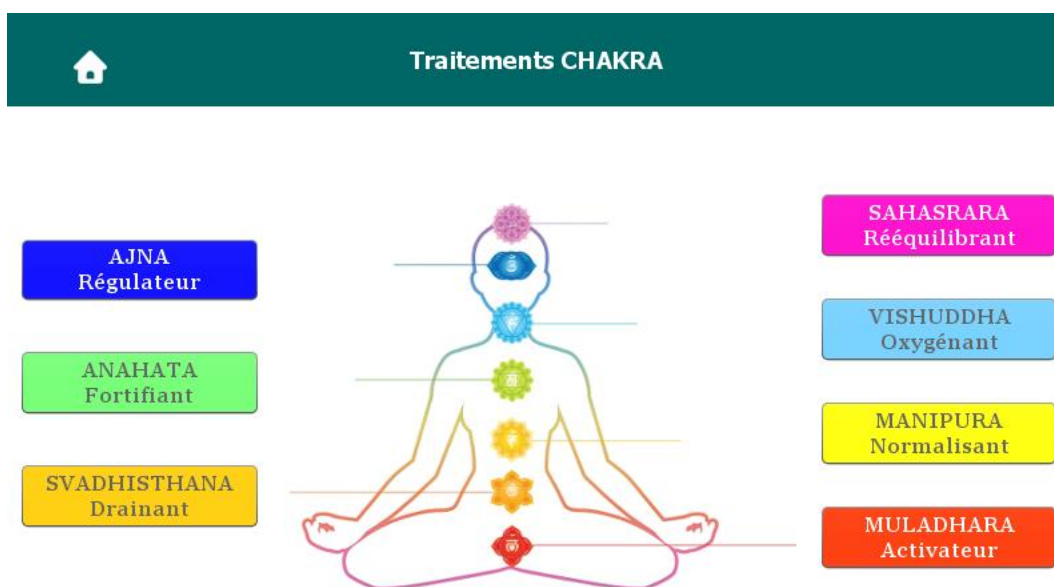

Choisissez le traitement le plus adapté au problème esthétique rencontré parmi ceux à l'écran

5.3.4.1 AJNA [Régulateur]

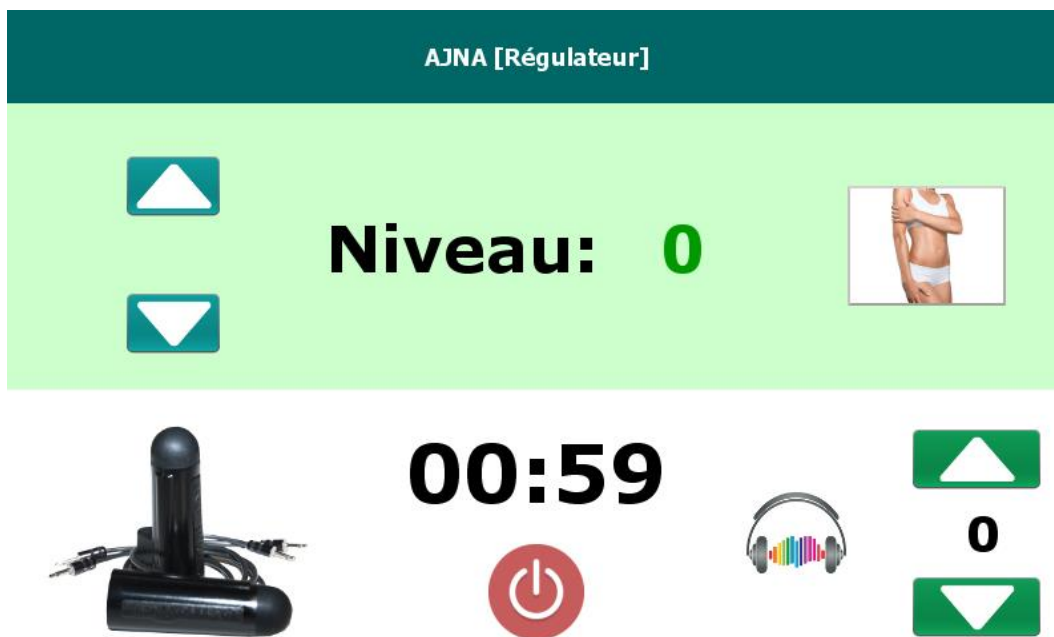

Demandez au client de porter les écouteurs.

Réglez le volume avec les flèches haut / bas, vous verrez le nombre changer entre les flèches elles-mêmes. Le bruit / son doit être agréable.

Ces pièces à main sont utilisées en cas de :

Soins visage spécifiques

Relaxations de la peau

Stimulations sur les triggers points

Appliquez le cosmétique le plus approprié sur la peau, placez les pièces à main sur la peau du client, augmentez la puissance et commencez à travailler avec précision sur la partie à traiter.

À la fin du temps de traitement, l'appareil s'éteint automatiquement

5.4 Traitements Chackra visage


Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Chackra visage:

Pour les soins du visage, suivez les instructions des points précédents Traitements Chackra corps.

5.5 Traitement Brut Blanc

Bruit Blanc: caractérisé par l'absence de périodicité dans le temps et par l'amplitude sur tout le spectre de fréquences, il constitue une barrière aux autres sons.

Particulièrement adapté aux problèmes de TINNESS ou INSOMNIA

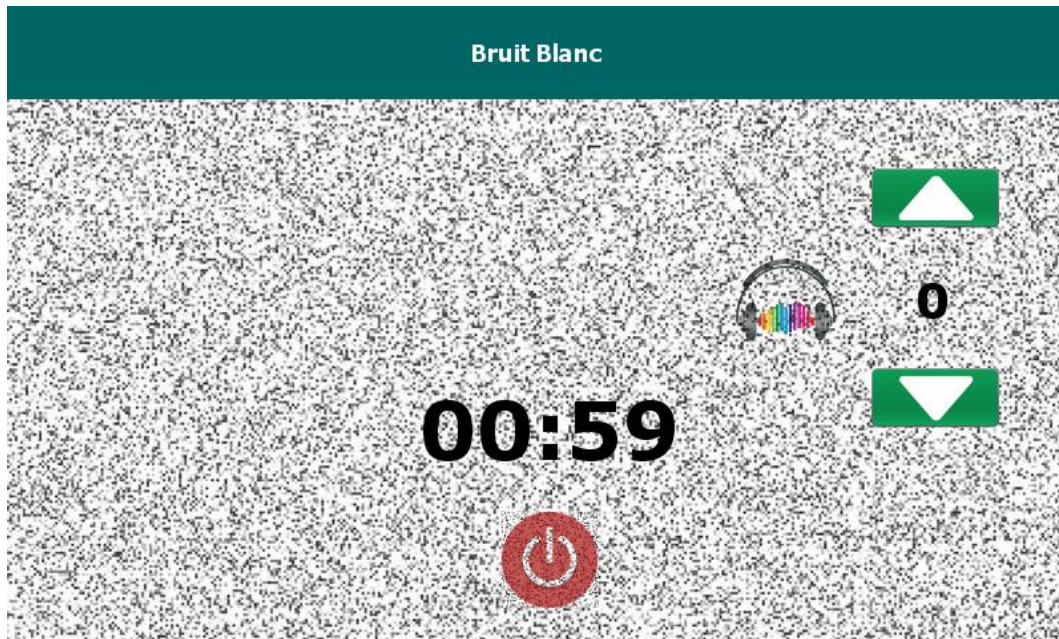

Demandez au client de porter les écouteurs.

Réglez le volume avec les flèches haut / bas, vous verrez le nombre changer entre les flèches elles-mêmes.
Le bruit / son doit être agréable.

À utiliser en cas d'acouphènes ou en ouverture avant toutes les différentes typologies du traitement.

5.6 Traitements Ondes Acoustiques



Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Ondes Acoustiques :



Choisissez la fréquence en fonction du problème esthétique du client

5.6.1 Fréquence 396Hz

Est particulièrement adaptée pour soulager l'esprit de l'oppression et de l'anxiété.

5.6.2 Fréquence 417 Hz

Est particulièrement adaptée pour stimuler le changement et abandonner le passé.

5.6.3 Fréquence 528Hz

Est particulièrement adaptée à la restauration et à l'harmonisation de l'individu.

5.6.4 Fréquence 639Hz

Est particulièrement adaptée pour stimuler l'ouverture dans les relations humaines.

5.6.5 Fréquence 741Hz

Est particulièrement adaptée à l'éveil intérieur.

5.6.6 Fréquence 852Hz

Est particulièrement adaptée pour revenir à l'ordre spirituel.

5.6.7 Fréquence de 1725 Hz


Stimule la glande pituitaire et ses fonctions.

Cette glande est le pivot de l'horloge interne, elle régule les rythmes Circadiens-sommeil/éveil-fatigue et manque de lucidité, l'hormone mélatonine responsable de cette régulation.

Métabolisme osseux : des recherches menées sur des souris ont suggéré que des changements dans la fonction de la glande pinéale pourrait affecter le métabolisme osseux.

Les femmes ménopausées sont nettement plus vulnérables à l'ostéoporose : cela pourrait être dû au fait que l'efficacité de la glande pinéale a tendance à diminuer avec l'âge.

Demandez au client de porter les écouteurs.
Après avoir choisi la fréquence, l'écran change comme suit :

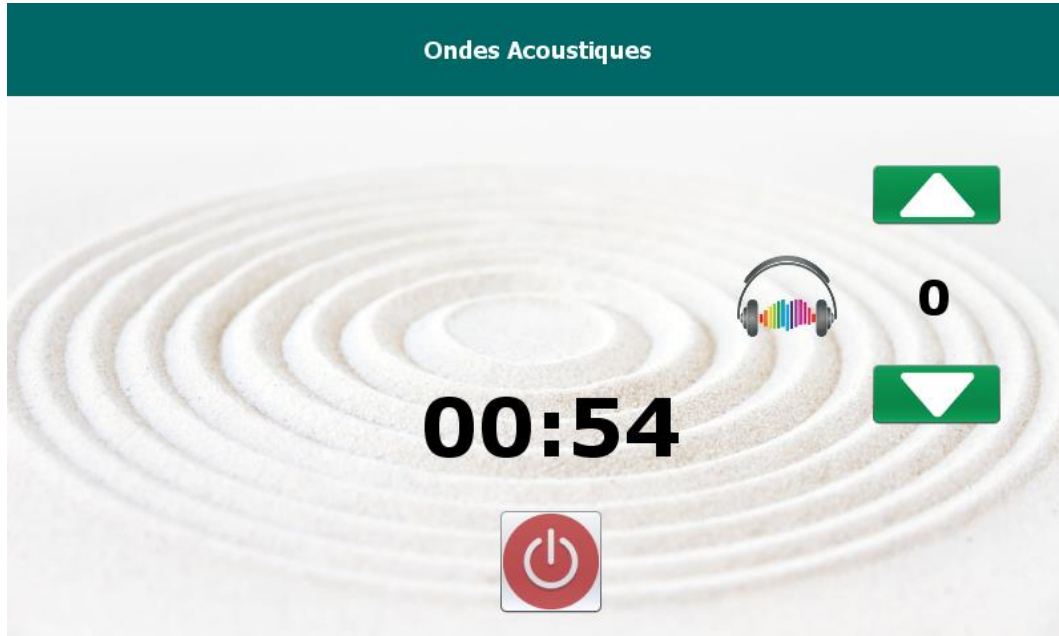


Réglez le volume avec les flèches haut / bas, vous verrez le nombre changer entre les flèches elles-mêmes.
Le bruit / son doit être agréable.

À la fin du temps de traitement, l'appareil s'éteint automatiquement

5.7 Traitements Manuel corps

Avant de commencer le traitement, connectez la pièce à main corps chaud et vérifiez que les pièces à main de stimulation sont connectées


Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Manuel corps:

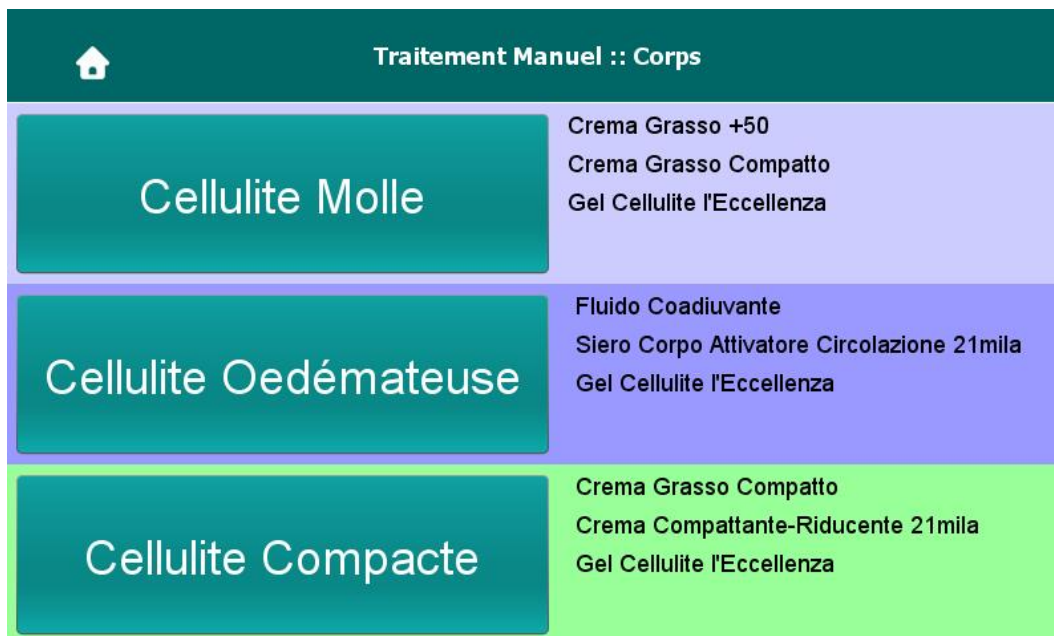

Choisissez le traitement le plus adapté à l'imperfection trouvée.

Appliquez le cosmétique le plus approprié sur la peau


5.7.1 Traitement Cellulite Molle

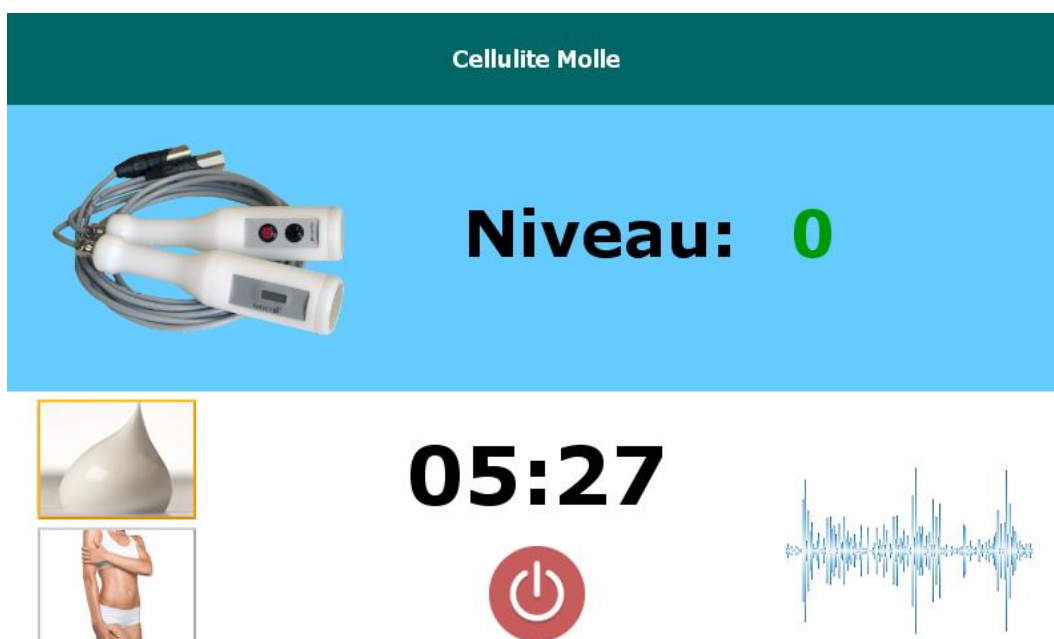

Durée totale du traitement 45 minutes

Phase 1, Stimulation avec pièces à main, durée 20 minutes

A la fin de la phase 1 le traitement s'arrête pendant 30 secondes avant de commencer la phase suivante
L'écran suivant apparaît :

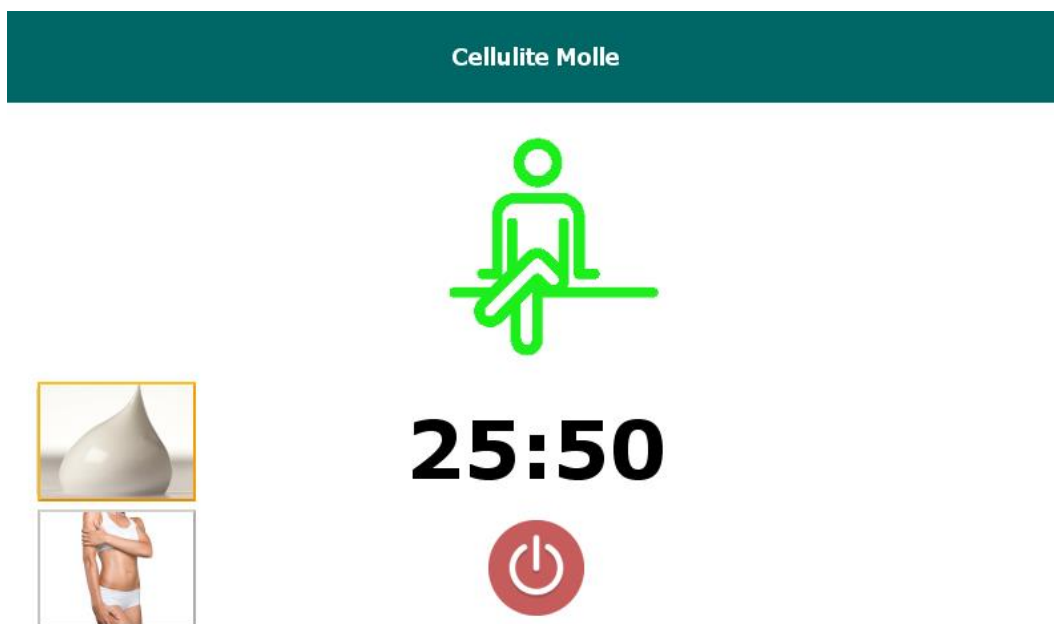

Vérifier le produit cosmétique
L'écran change comme suit :



Phase 2, PH 21 avec pièces à main, durée 5 minutes

A la fin de la phase 2 le traitement s'arrête pendant 30 secondes avant de commencer la phase suivante
Vérifier le produit cosmétique

Manuel d'utilisation

L'écran change comme suit :




Phase 3, Microcourants avec pièces à main, durée 10 minutes

A la fin de la phase 3, le traitement s'arrête et l'appareil émet un signal sonore avant de démarrer la phase suivante

Vérifier le produit cosmétique


L'écran change comme suit :

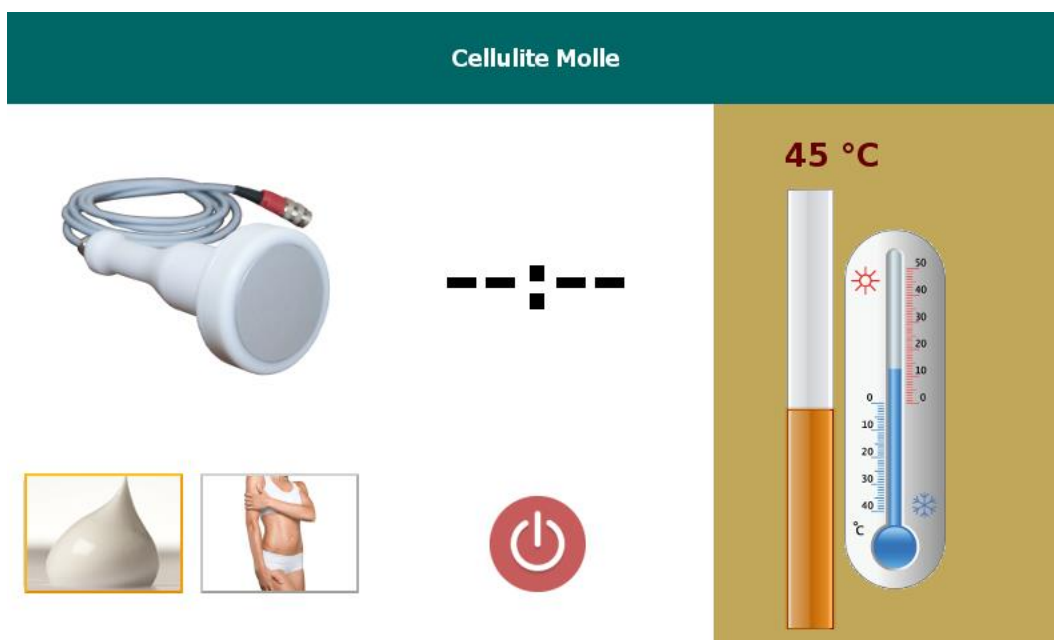

Attendez que la pièce à main se réchauffe

Lorsqu'il est prêt, il émet un bip et la minuterie démarre

L'écran change comme suit :

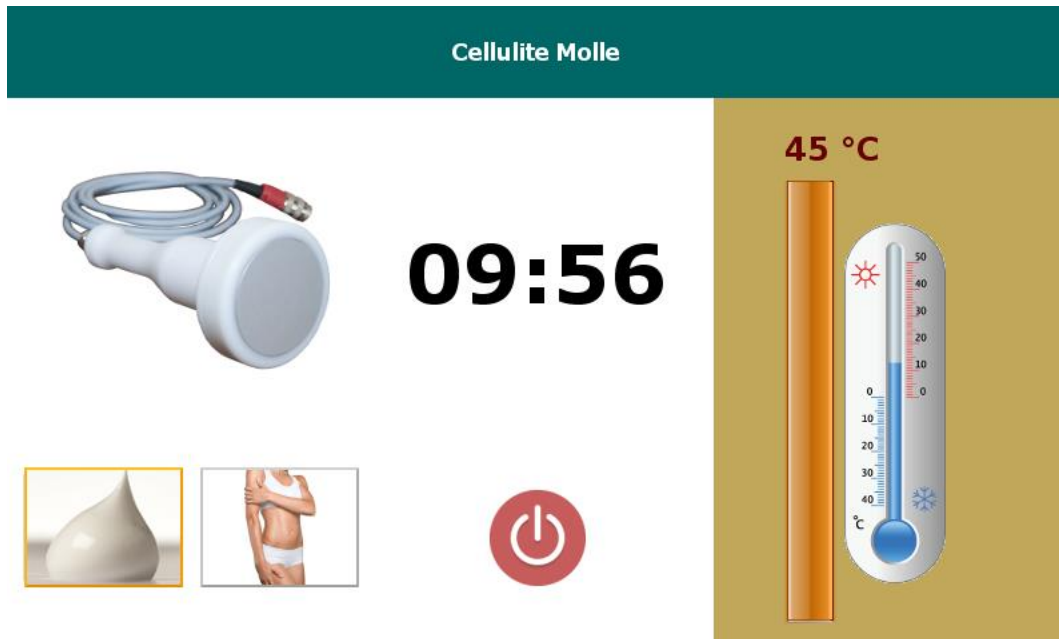


Étape 4, Réchauffer avec une grande pièce à main ronde, durée 10 minutes
À la fin du temps de traitement, l'appareil s'éteint automatiquement

5.8 Traitements Manuel visage

Avant de commencer le traitement, connectez la pièce à main visage chaud et vérifiez que les pièces à main de stimulation sont connectées


Appuyez sur l'écran tactile sur l'icône Manuel visage :

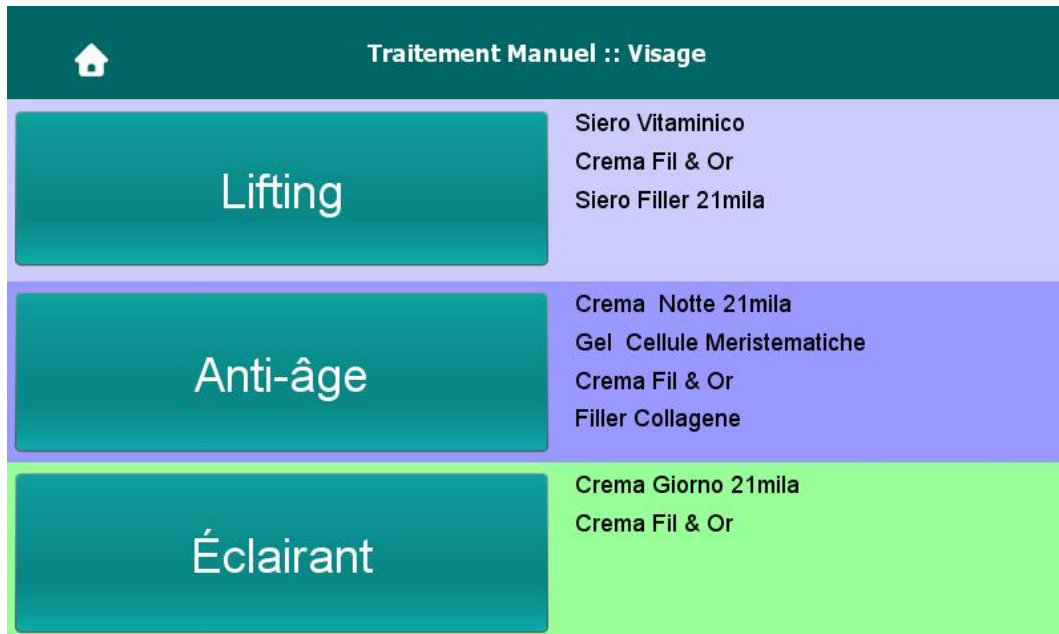

Choisissez le traitement le plus adapté à l'imperfection trouvée.

Appliquer le produit en fonction de protocole choisi.


5.8.1 Traitement Lifting

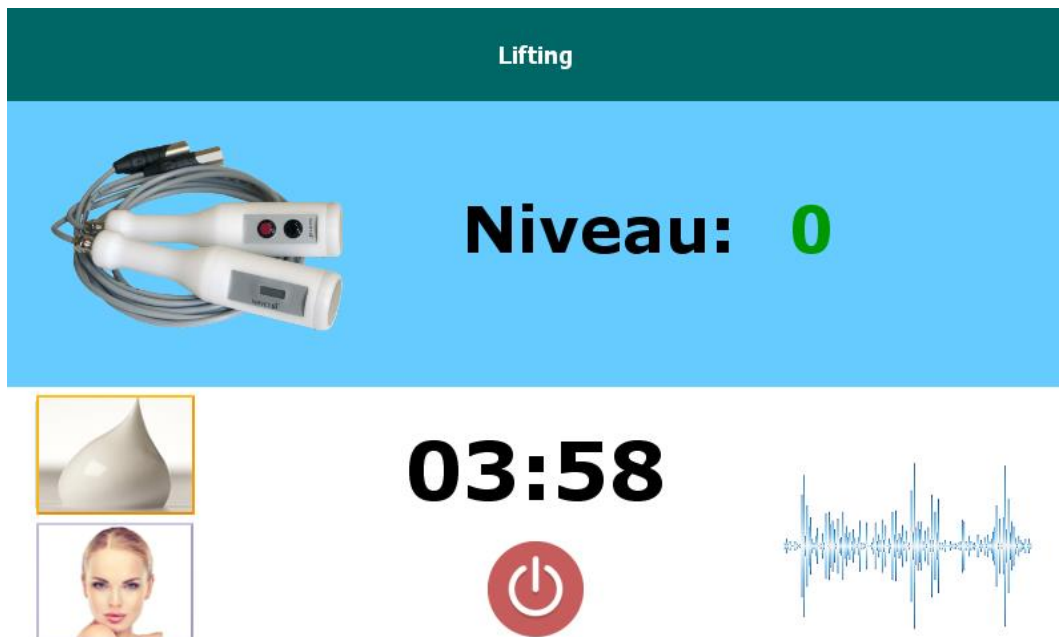

Durée totale du traitement 30 minutes

Phase 1, Stimulation avec pièces à main, durée 10 minutes

A la fin de la phase 1 le traitement s'arrête pendant 30 secondes avant de commencer la phase suivante
L'écran suivant apparaît :

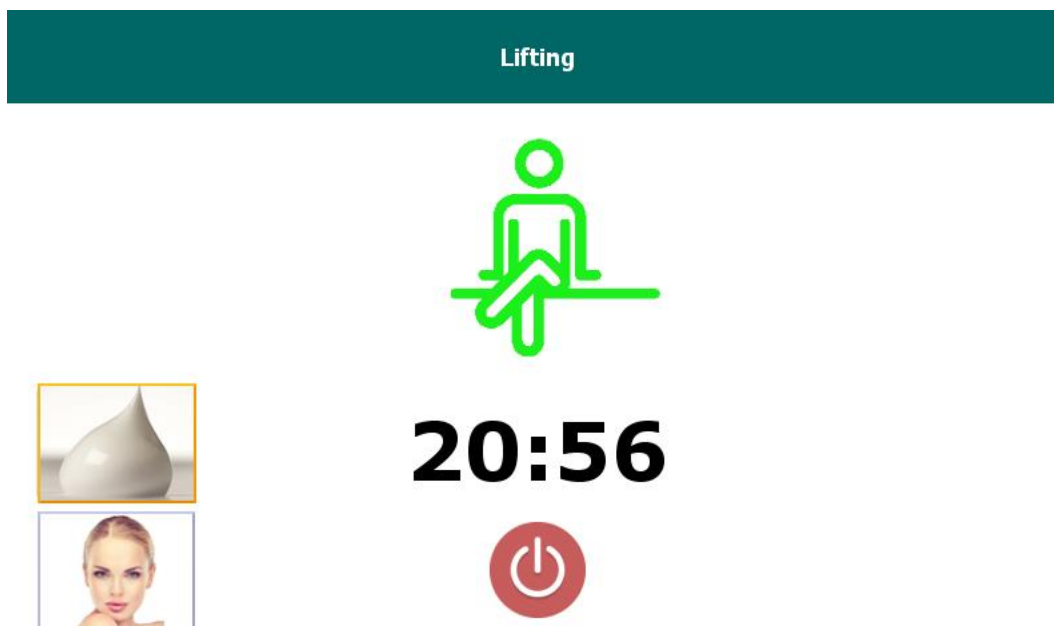

Vérifier le produit cosmétique
L'écran change comme suit :



Phase 2, PH 21 avec pièces à main, durée 5 minutes

A la fin de la phase 2 le traitement s'arrête pendant 30 secondes avant de commencer la phase suivante
Vérifier le produit cosmétique

L'écran change comme suit :




Phase 3, Microcourants avec pièces à main, durée 5 minutes

A la fin de la phase 3, le traitement s'arrête et l'appareil émet un signal sonore avant de démarrer la phase suivante


Vérifier le produit cosmétique

L'écran change comme suit :

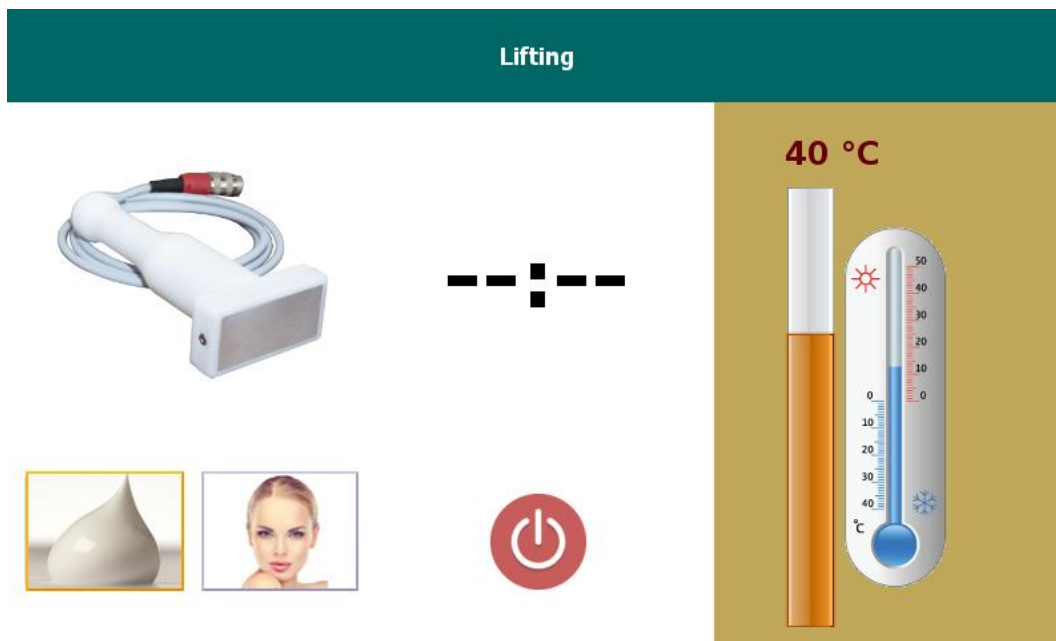

Attendez que la pièce à main se réchauffe
Lorsqu'il est prêt, il émet un bip et la minuterie démarre

L'écran change comme suit :

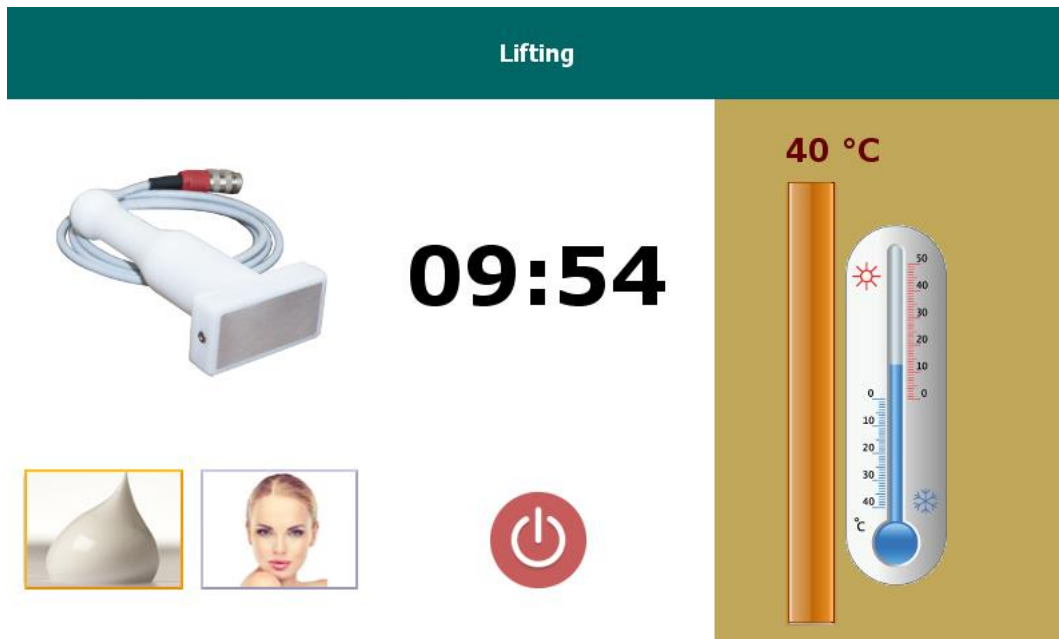

Phase 4, chaud avec petite pièce à main rectangulaire, 10 minutes

À la fin du temps de traitement, l'appareil s'éteint automatiquement

5.9 Traitements Automatique corps

Avant de commencer le traitement, connectez la pièce à main du corps chaud.

Positionner les électrodes en fonction du problème à traiter, voir 8.3 Exemples de position d'électrode.

Connectez les électrodes aux câbles.

Traitement Automatique :: Corps	
Cellulite Molle	Crema Grasso +50 Crema Grasso Compatto Gel Cellulite l'Eccellenza
Cellulite Oedémateuse	Fluido Coadiuvante Siero Corpo Attivatore Circolazione 21mila Gel Cellulite l'Eccellenza
Cellulite Compacte	Crema Grasso Compatto Crema Compattante-Riducente 21mila Gel Cellulite l'Eccellenza

Choisissez le traitement le plus adapté à l'imperfection trouvée.

Appliquer le produit en fonction de protocole choisi.

5.9.1 Traitement Cellulite molle

Cellulite Molle

0 0 0 0 0 0 0 0

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8

05:29


Ajustez la stimulation, canal par canal, avec les flèches haut / bas

Durée totale du traitement 45 minutes


Phase 1, Stimulation, d'une durée de 20 minutes

A la fin de la phase 1 le traitement s'arrête pendant 30 secondes avant de commencer la phase suivante

L'écran suivant apparaît :

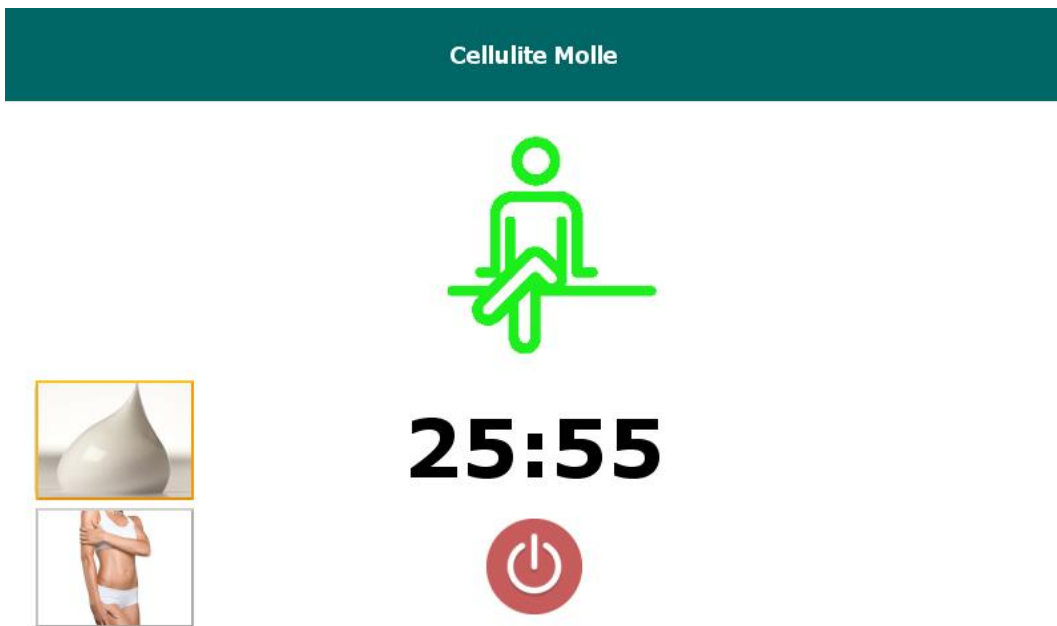


Vérifier le produit cosmétique
L'écran change comme suit :

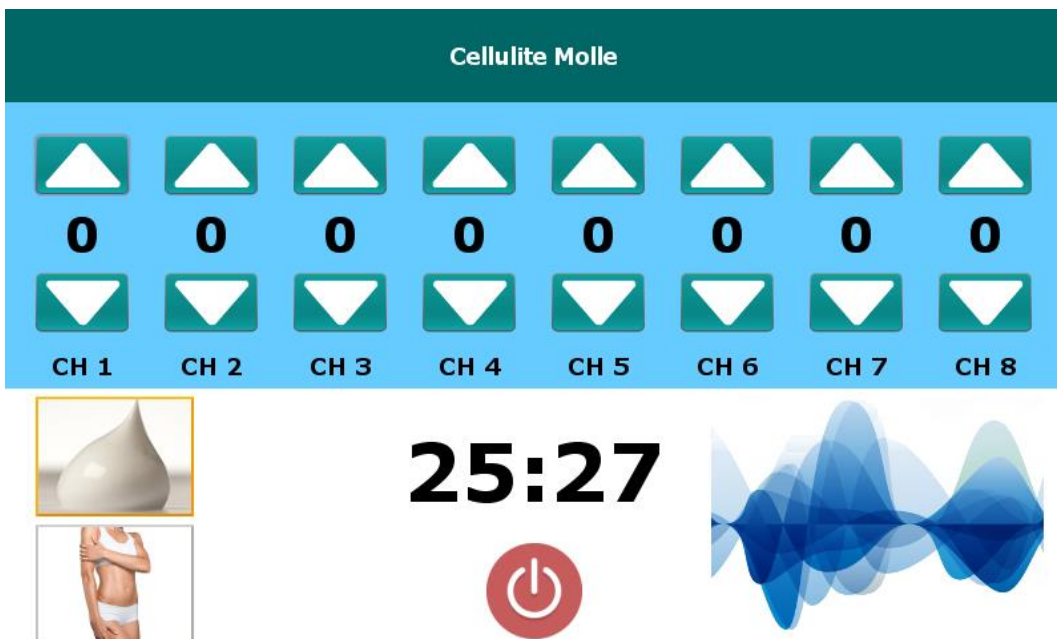

Ajustez la stimulation, canal par canal, avec les flèches haut / bas
Phase 2, automatique PH 21 avec câbles, durée 5 minutes
A la fin de la phase 2 le traitement s'arrête pendant 30 secondes avant de commencer la phase suivante


L'écran change comme suit :

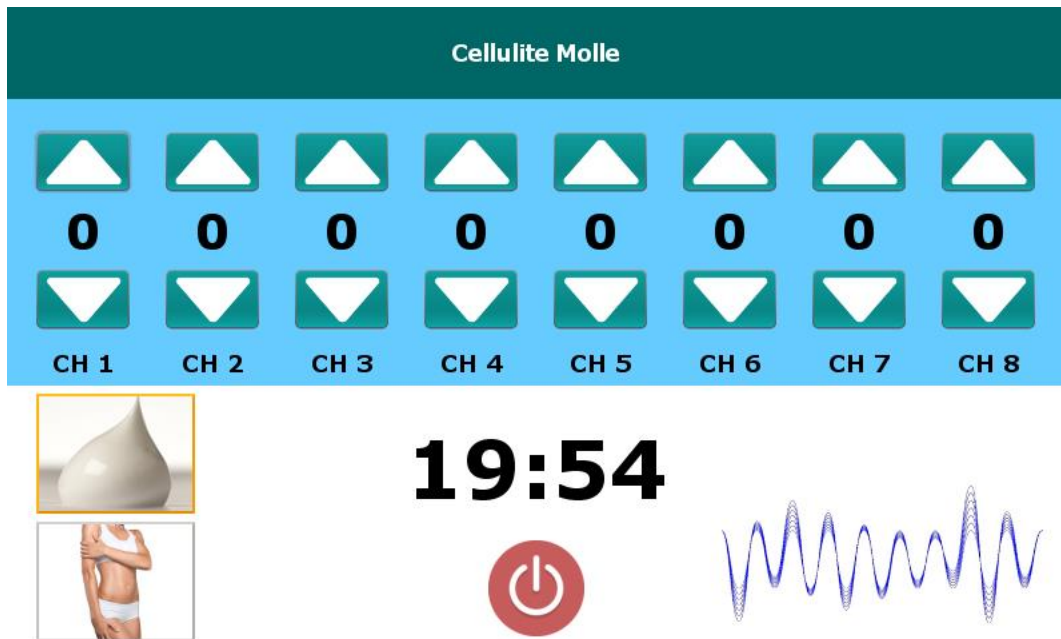

Ajustez la stimulation, canal par canal, avec les flèches haut / bas
Phase 3, Microcourants avec pièces à main, durée 10 minutes


A la fin de la phase 3, le traitement s'arrête et l'appareil émet un signal sonore avant de démarrer la phase suivante
Débranchez les câbles et retirez les électrodes.

L'écran change comme suit :

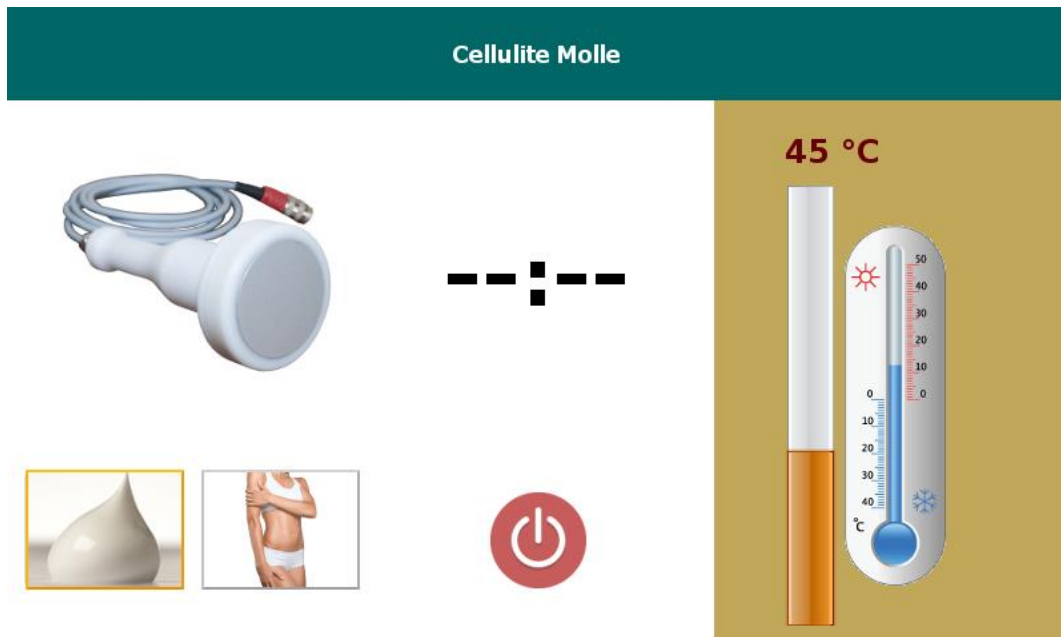

Attendez que la pièce à main se réchauffe.
Lorsqu'il est prêt, il émet un bip et la minuterie démarre.

L'écran change comme suit :

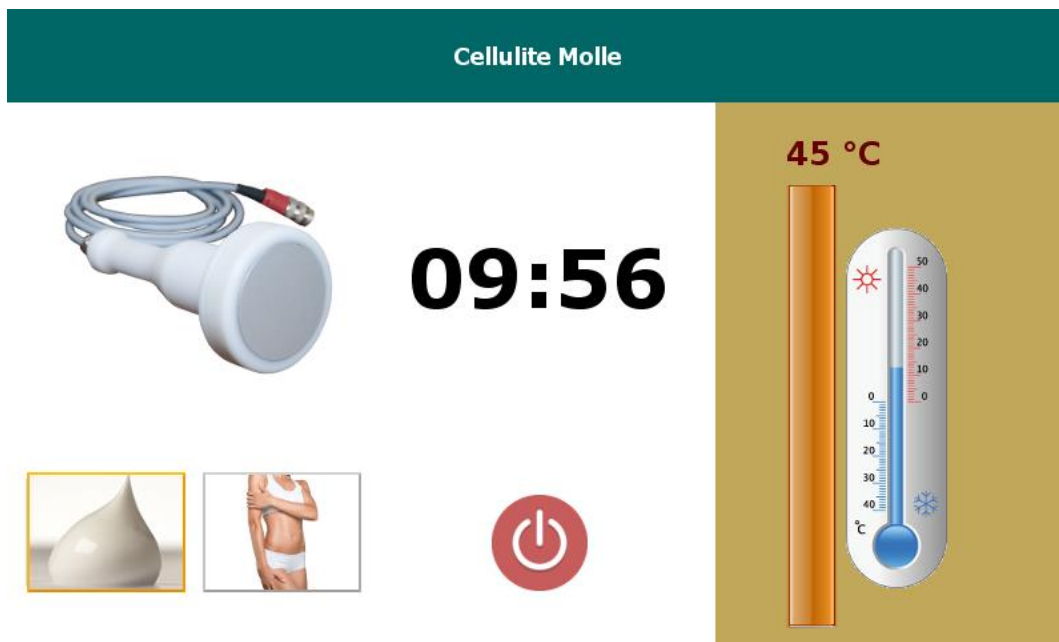

Étape 4, Réchauffer avec une grande pièce à main ronde, durée 10 minutes


À la fin du temps de traitement, l'appareil s'éteint automatiquement

5.10 Traitements Automatique visage

Avant de commencer le traitement, connectez la pièce à main pour le visage chaud.

Positionner les électrodes adhésives en fonction du problème à traiter, voir 8.3 Exemples de placement des électrodes.


Connectez les électrodes aux câbles.

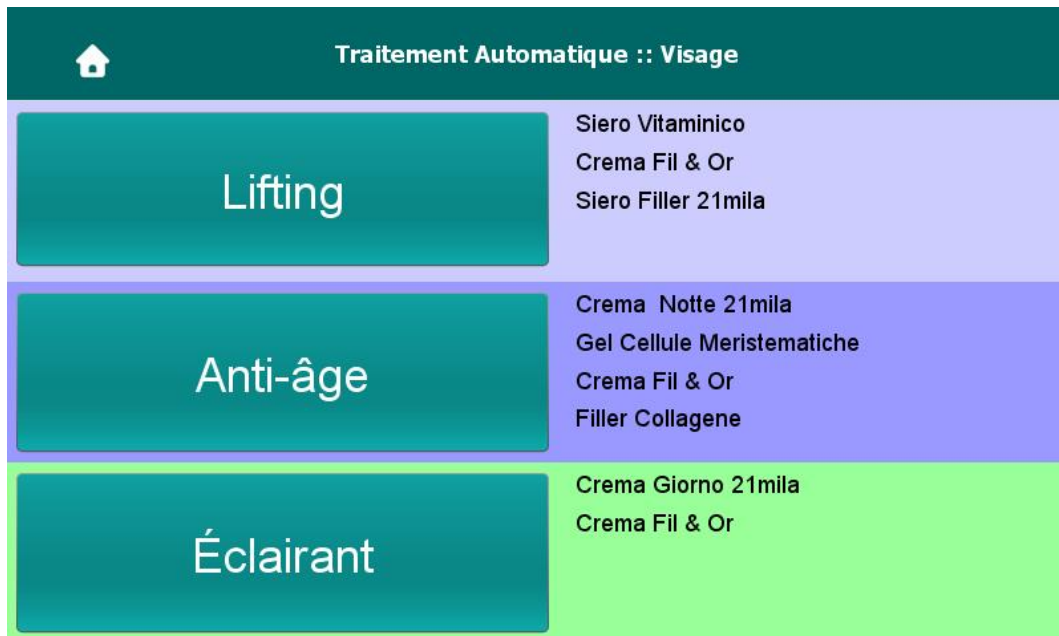

Choisissez le traitement le plus adapté à l'imperfection trouvée.

Appliquer le produit en fonction de protocole choisi.

5.10.1 Traitement Lifting

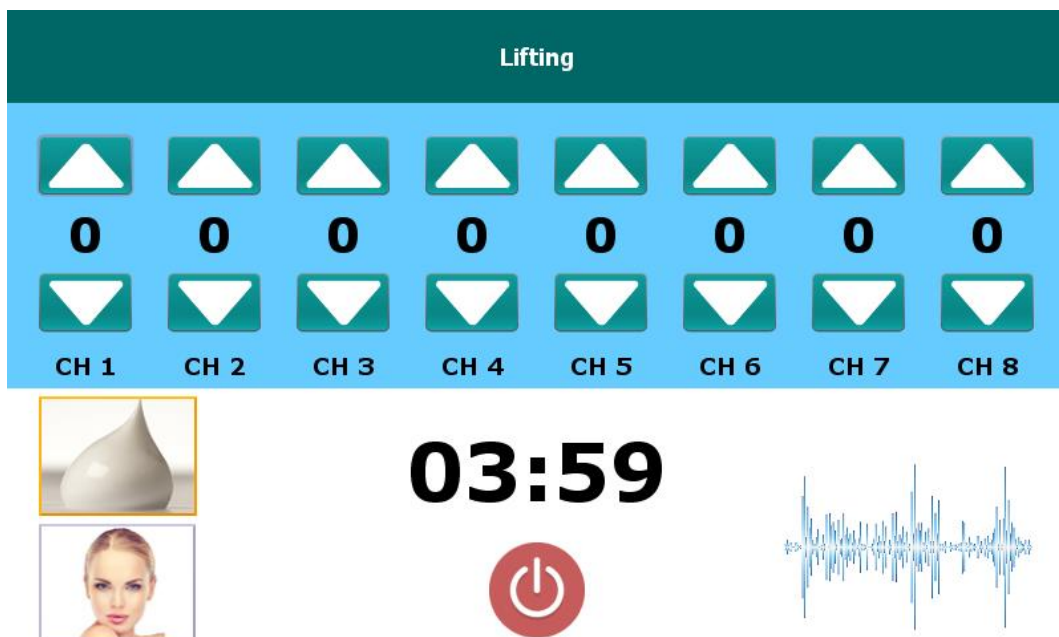


Ajustez la stimulation, canal par canal, avec les flèches haut / bas


Durée totale du traitement 30 minutes

Phase 1, Stimulation avec pièces à main, durée 10 minutes

A la fin de la phase 1 le traitement s'arrête pendant 30 secondes avant de commencer la phase suivante
L'écran suivant apparaît :

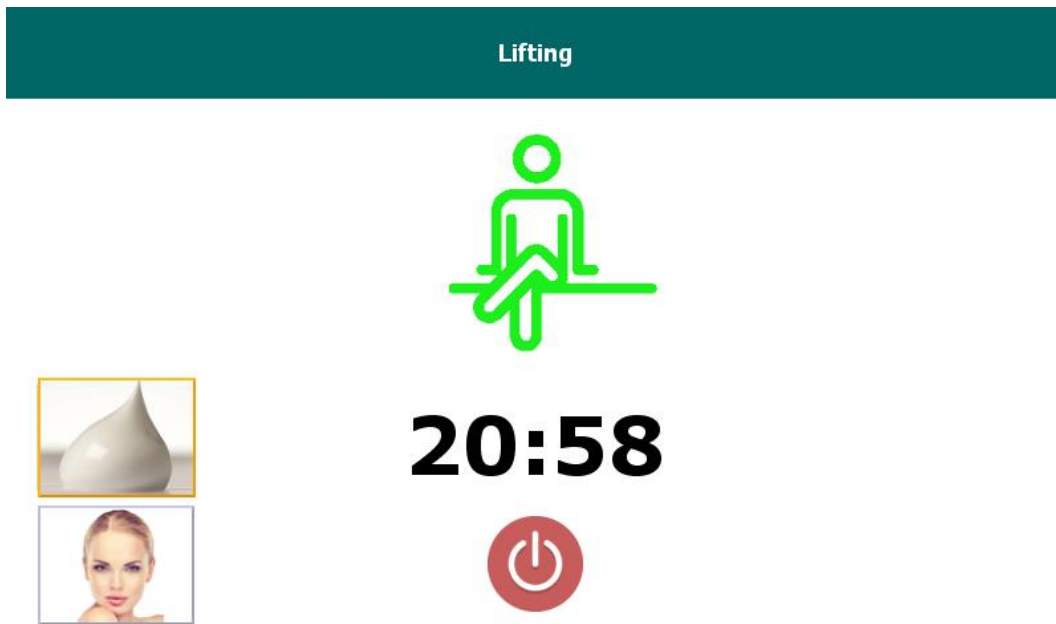


Vérifier le produit cosmétique
L'écran change comme suit :

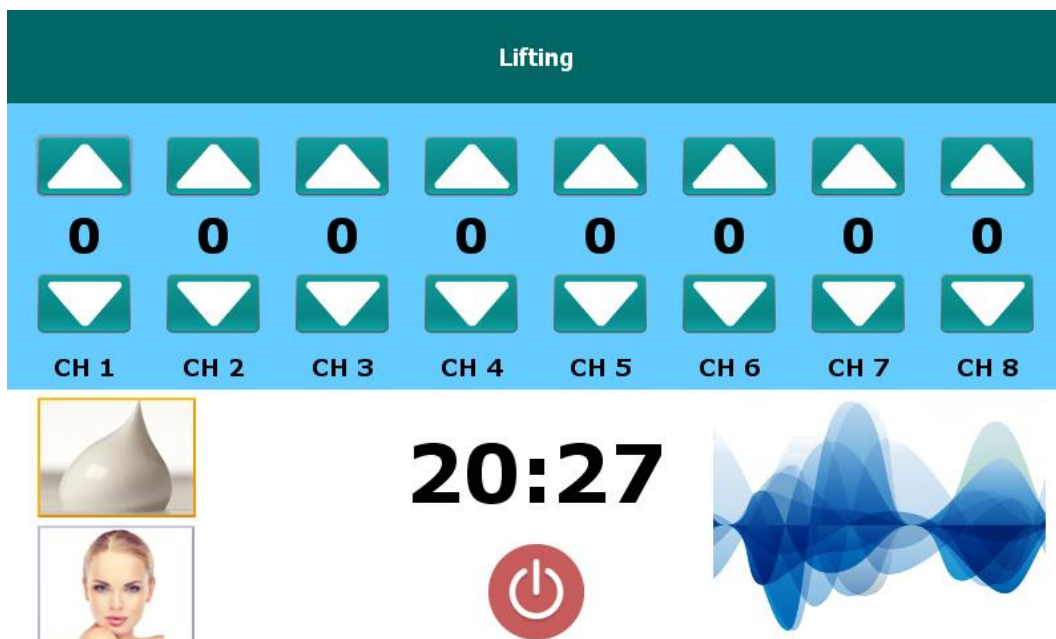

Ajustez la stimulation, canal par canal, avec les flèches haut / bas
Phase 2, automatique PH 21 avec câbles, durée 5 minutes

A la fin de la phase 2 le traitement s'arrête pendant 30 secondes avant de commencer la phase suivante
Vérifier le produit cosmétique


L'écran change comme suit :

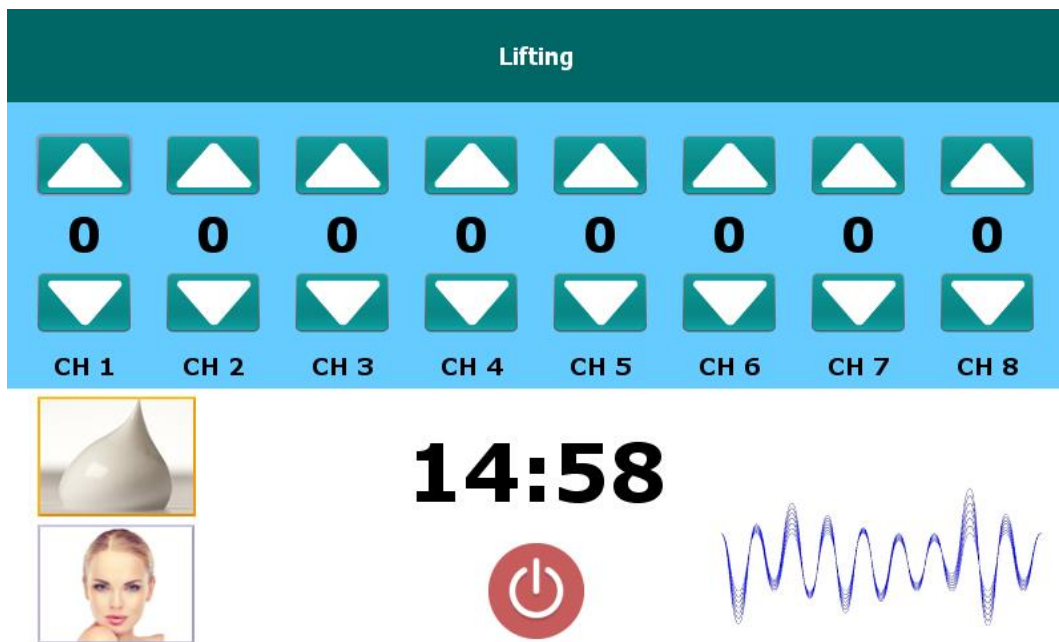

Ajustez la stimulation, canal par canal, avec les flèches haut / bas
Phase 3, Microcourants avec câbles, durée 5 minutes


A la fin de la phase 3, le traitement s'arrête et l'appareil émet un signal sonore avant de démarrer la phase suivante
Débranchez les câbles et retirez les électrodes.

L'écran change comme suit :

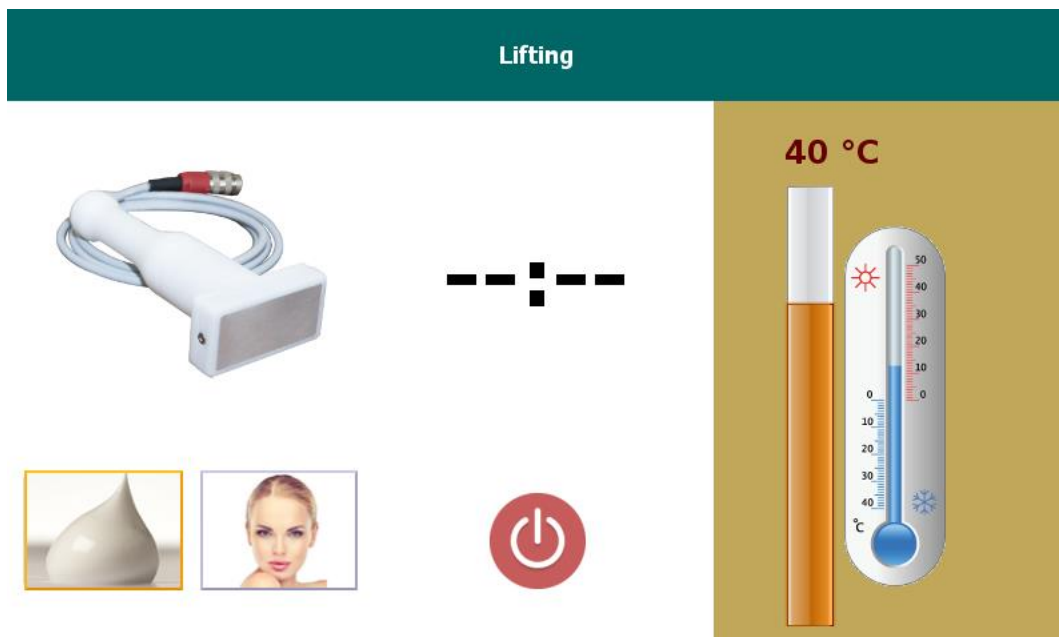

Attendez que la pièce à main se réchauffe
Lorsqu'il est prêt, il émet un bip et la minuterie démarre

L'écran change comme suit :

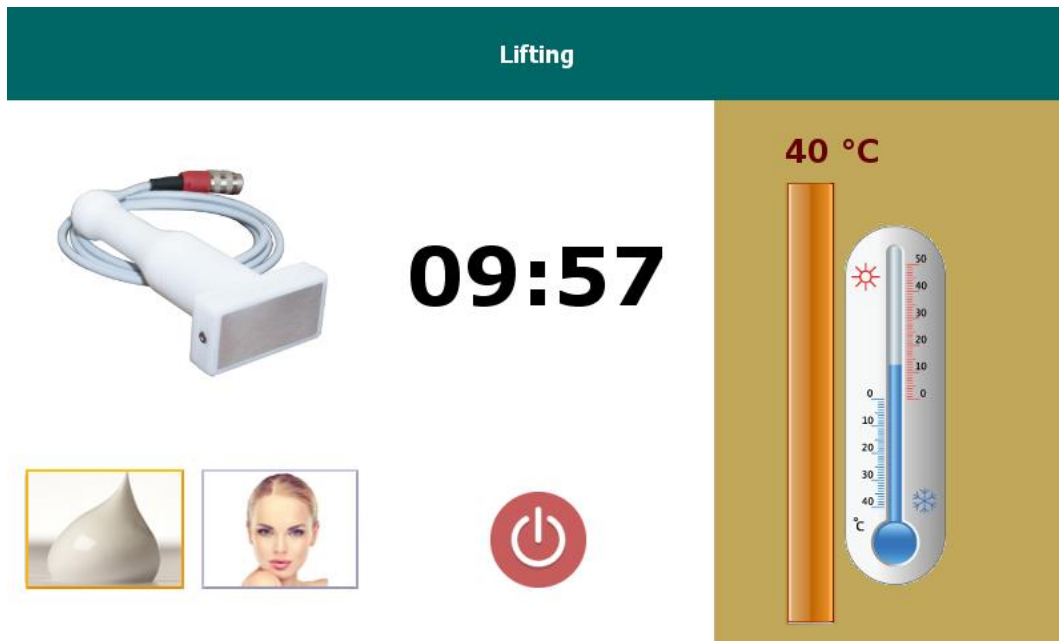

Phase 4, Chaud avec petite pièce à main rectangulaire, 10 minutes

À la fin du temps de traitement, l'appareil s'éteint automatiquement

5.11 Boutons communs aux soins automatiques et manuels, visage et corps

5.11.1 Produits cosmétiques



En appuyant sur cette icône, l'appareil ouvre un écran récapitulatif des produits cosmétiques à utiliser
Tel que celui visible ci-dessous


Crema Grasso +50
Crema Grasso Compatto
Gel Cellulite l'Eccellenza



5.11.2 Tables de soins corporels




En appuyant sur cette icône, l'appareil ouvre un écran présentant un exemple de table de traitement à utiliser
Tel que celui visible ci-dessous

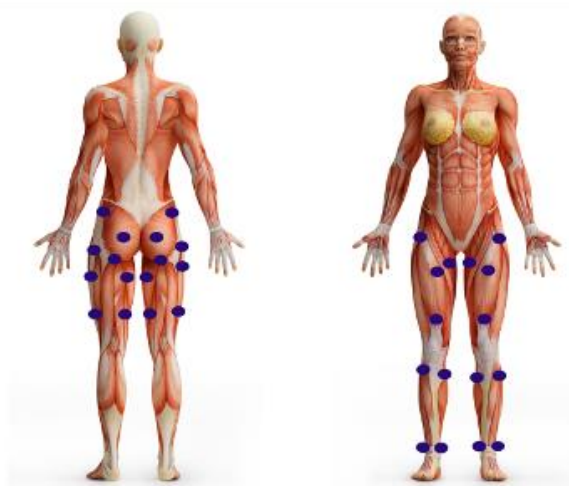


5.11.3 Tables de traitement du visage



En appuyant sur cette icône, l'appareil ouvre un écran présentant un exemple de table de traitement à utiliser
Tel que celui visible ci-dessous

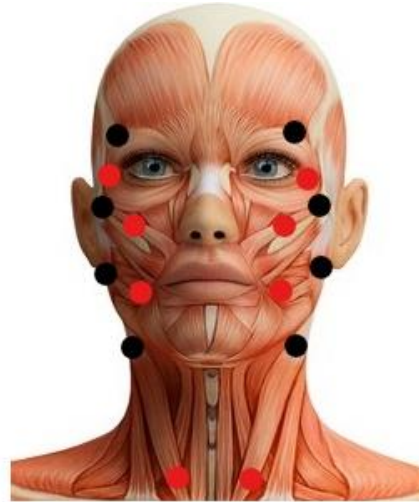

Pour quitter chacun de ces écrans, appuyez sur 

6 Mise à jour du logiciel

L'appareil a la possibilité de mettre à jour le système si certains programmes doivent être modifiés ou ajoutés.

Vous pouvez recevoir la mise à jour de deux manières différentes:

1. Nous vous envoyons un fichier par e-mail que vous devez copier sur une clé USB (vide de préférence).
2. Vous recevez directement la clé USB contenant la mise à jour.

Comment utiliser la clé USB contenant la mise à jour:

- Insérez la clé USB dans l'appareil lorsque celui-ci est éteint. Le port USB se situe sous le moniteur du panneau frontal.
- Activez l'appareil et laissez-le travailler durant une minute. Cela permet aux programmes de se charger.
- Eteignez l'appareil.
- Enlevez la clé USB.
- Allumez à nouveau l'appareil et vérifiez que toutes les mises à jour ont été installées correctement.

7 Procédure d'entretien

7.1 Généralités

1. Les instructions de sécurité citées ci-dessous permettent au personnel chargé de la maintenance de l'appareil de s'en occuper correctement.
2. Toutes les parties déplacées doivent être marquées et identifiées pour en faciliter l'installation.

7.2 Précautions de sécurité

Avant d'effectuer les opérations d'entretiens sur l'appareil, veuillez à observer les précautions générales de sécurité suivantes :

**AVANT DE DEPLACER OU D'INSTALLER LE TABLEAU DE CONTROLE:
POSITIONNEZ L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION SUR OFF
DETACHEZ LE CABLE D'ALIMENTATION DE L'APPAREIL
NE PAS TOUCHEZ L'APPAREIL AVEC LES MAINS MOUILLEES**

7.3 Tableau d'entretien préventif

Concernant l'entretien préventif de l'appareil, référez-vous au tableau suivant:

INTERVALLE D'INSPECTION	OPÉRATION	INTERVALLE D'INSPECTION		
		D/W	M	Y
EASY 21 (partie externe)	Inspection		●	
Prise de courant	Inspection		●	
EASY 21	Test		●	
Câble d'alimentation	Inspection			●
Connexions internes	Inspection			●
Composante interne	Inspection			●

7.4 Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'équipement ne s'allume pas	Le bouton de commande n'a pas été écrasé	Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position ON
	Fusible brûlé	Vérifier / remplacer le fusible
	Interrupteur d'alimentation défectueux	Contactez le service d'assistance
	Panne du système électrique de l'appareil	Contactez le service d'assistance
	Le câble d'alimentation n'est pas installé correctement	Vérifiez la bonne installation du câble d'alimentation
	Câble d'alimentation défectueux	Remplacez le câble d'alimentation
	L'appareil n'est pas alimenté correctement	Vérifiez l'alimentation correcte (220V/ 50 Hz).
	Le produit est utilisé dans un environnement avec une température trop élevée / trop basse	Utilisez le produit aux températures recommandées entre 15 et 22 ° C
	Prise électrique défectueuse	Changez la prise électrique dans la chambre
L'affichage ne s'allume pas	L'appareil a subi un choc	Contactez le service d'assistance
	Dans le système de réseau s'est produit un court-circuit	Contactez le service d'assistance
J'ai reçu un choc pendant l'utilisation de l'équipement	Utilisation d'adaptateurs ou de rallonges multiprises	Vérifiez qu'ils sont conformes à la norme CE, qu'ils ont les exigences en matière d'alimentation, qu'ils ont la forme correcte pour les prises et les prises utilisées et qu'ils sont bien reliés à la terre.
L'appareil n'émet aucun avertissement sonore	Fiche électronique défectueuse	Contactez le service d'assistance
Aucune stimulation n'est ressentie	Le produit n'est pas allumé	Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position ON
	Aucun produit cosmétique n'a été appliqué sur la peau	Assurez-vous qu'un produit cosmétique est toujours en contact avec la peau pendant le traitement
	Les pièces à main n'ont pas été insérées correctement	Assurez-vous que les connecteurs sont insérés correctement
	Le bouton noir de la pièce à main n'a pas été enfoncé pour activer la puissance du courant	Appuyez sur le bouton noir de la pièce à main
	Fiche électronique défectueuse	Contactez le service d'assistance
L'électrostimulation est faible	Le niveau d'électrostimulation réglé est bas	Augmenter le niveau avec le bouton noir
	Les pièces à main n'ont pas été insérées correctement	Assurez-vous que les connecteurs sont insérés correctement

	Pas assez de produit cosmétique a été appliqué sur la peau	Assurez-vous qu'un produit cosmétique est toujours en contact avec la peau pendant le traitement
Les pièces à main d'électrostimulation n'émettent pas de couleur	Les pièces à main n'ont pas été insérées correctement	Assurez-vous que les connecteurs sont insérés correctement
	Fiche électronique des pièces à main défectueuse	Contactez le service d'assistance
Transformateur défectueux		Contactez le service d'assistance
La peau est rouge et pique	Le cosmétique n'a pas été en contact avec la peau pendant le traitement	Assurez-vous qu'un produit cosmétique est toujours en contact avec la peau pendant le traitement
	Le niveau d'électrostimulation réglé est trop élevé	Abaisser le niveau
	La pièce à main pour le traitement par le froid est restée immobile pendant le traitement	Assurez-vous que la pièce à main pour le traitement par le froid est toujours en mouvement
	Une température pas appropriée au type de peau ou de zone a été utilisée	Veillez à utiliser une température plus élevée dans les zones les plus délicates du corps ou pour les peaux hyper sensibles

En cas d'anomalie, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le représentant du service client du fabricant ou de l'importateur local.

7.5 Nettoyage

7.6 Nettoyage de l'appareil

Avant de nettoyer le produit, assurez-vous qu'il est éteint. Si vous nettoyez le produit lorsqu'il est allumé, vous risquez de subir une stimulation électrique.

Pour nettoyer l'appareil il faut procéder de cette façon :

NE PAS UTILISER DE SOLVANT CHIMIQUE OU PRODUITS ABRASIFS AFIN D'ÉVITER DES DOMMAGES A CERTAINES PARTIES DE L'APPAREIL

NE PAS VERSER D'EAU A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL ET/OU SUR LES PARTIES ELECTRONIQUES.

- I. Mettre l'appareil en sécurité de la façon suivante :
 - Positionnez sur OFF l'interrupteur d'alimentation.
 - Détachez le câble d'alimentation de l'appareil.
- II. Nettoyez les surfaces externes de l'appareil en utilisant un linge humide et du détergent neutre. Les matières grasses et les taches résistantes peuvent être effacées en utilisant des produits commerciaux spécifiques pour le nettoyage.

- III. Utilisez des aspirateurs industriels pour éliminer tous les résidus de matériel dans la zone d'installation du dispositif.
- IV. Utilisez des tissus synthétiques pour sécher les parties nettoyées.
- V. Si nécessaire, utilisez des instruments adéquats pour le nettoyage des parties qui sont difficiles à atteindre.
- VI. Ne pas introduire de matériaux de quelque genre que ce soit dans les espaces réfrigérants de l'appareil. Il ne faut absolument pas essayer de nettoyer les parties internes à travers ces espaces.
- VII. Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer l'écran.

7.7 Nettoyage des accessoires

Pour nettoyer les accessoires, procédez comme il suit:

**NE PAS UTILISER DE SOLVANT CHIMIQUE OU PRODUITS ABRASIFS
AFIN D'ÉVITER DES DOMMAGES AUX PIÈCES À LA MAIN**

**NE PAS PLONGER LES ACCESSOIRES DANS DES SOLUTIONS LIQUIDES.
L'IMMERSION ENGENDRE DES DÉGÂTS IRREPARABLES SUR LES APPAREILS ET
COMPROMET L'ISOLATION DES CÂBLES ÉLECTRONIQUES.**

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NOTE

Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à désinfecter correctement les accessoires. Ils pourraient être contaminés et potentiellement vecteurs d'infections diverses. **Il est important de désinfecter les pièces à main après chaque traitement.**

Le nettoyage des têtes de traitement est extrêmement important et doit être fait attentivement après chaque application. Les résidus de gel ou de crème séchés peuvent favoriser la naissance de bactéries ou de moisissures et de ce fait, limitent le fonctionnement correct de la machine.

- I. À la fin du traitement veillez à nettoyer les accessoires avec un produit adapté. L'appareil doit être nettoyé à l'aide d'un tissu délicat ou d'une éponge non-abrasive, imbibée d'une solution désinfectante à usage médical.
- II. Veillez à observer les instructions du producteur des produits pour le nettoyage et le type de désinfectant. Toujours vérifier que les principes actifs soient compatibles.
- III. Le tableau suivant apporte les indications nécessaires concernant le nettoyage et la désinfection de l'appareil durant ses phases d'utilisations:

Phases de préparation au traitement	Phases post traitement
1. Nettoyage mécanique des pièces à main et des câbles.	A. Désinfection de la peau et de la zone à traiter.
2. Désinfection de la peau et de la zone à traiter.	B. Désinfection de l'opérateur et utilisation des gants et masque.
3. Désinfection de l'opérateur et utilisation des gants et masque.	C. Nettoyage mécanique des pièces à main et des câbles

7.8 Questions et réponses

Q 1

Le produit peut-il être utilisé tous les jours ?

R 1

Oui.

Q 2

Comment dois-je prendre soin du produit ?

R 2

Enlevez la saleté sur la surface du produit avec un chiffon sec.

Nettoyez et désinfectez les accessoires à la fin de chaque utilisation.

Veillez à insérer les pièces à main dans les espaces prévus à cet effet.

Manipulez avec soin la pièce à main pour le traitement par le froid. Il est très fréquent que la pièce à main soit endommagée de façon permanente en cas de choc ou de chute.

Attendez toujours que la pièce à main revienne à la température ambiante avant d'éteindre l'appareil.

Q 3

A quel niveau d'électrostimulation devrais-je utiliser les pièces à main pour la stimulation ?

R 3

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, réglez le niveau bas (surligné en vert sur la poignée).

Après s'être habitué au niveau bas ou après une évaluation minutieuse de la sensibilité et de la réaction cutanée, ajuster le niveau de stimulation à la valeur désirée.

Q 4

Est-il correct d'appliquer une crème ou un gel avant utilisation de Easy 21 ?

R 4

L'utilisation d'une crème, à appliquer sur la peau et sur les têtes de pièces à main avant le traitement, est obligatoire pendant n'importe quel traitement.

Q 5

L'utilisation de ce produit entraînera-t-elle une inflammation de mes muscles ?

R 5

Non. Si dans tous les cas il y a une sensation de douleur ou de démangeaison ou si la zone traitée est excessivement rouge, évitez d'utiliser le produit ou diminuer le niveau d'électrostimulation et ajuster la température.

Comme pour toutes les technologies, nous recherchons continuellement des améliorations dans la technique et la fonction. Dans l'intérêt d'amélioration continue, cette publication est sujette à changement. En cas de doute, vérifiez auprès de votre fournisseur.

8 Protocoles Easy 21

8.1 Automatique Visage

LIFTING	1. Stimulation 10 min. Pause 30" 2. Ph 21 5 minutes Pause 30" 3. Micro RAMPE 5 minutes Début du chauffage 4. Réchauffer 10 min.	SIERO VITAMINICO CREMA FIL & OR SIERO FILLER 21 MILA
ANTI-ÂGE:	1. Stimulation 10 min. Pause 30" 2. Ph 21 5 minutes Pause 30" 3. Micro PULSE 5 minutes Début du chauffage 4. Réchauffer 10 min.	CREMA NOTTE GEL CELLULE MERISTEMATICHE CREMA FIL & OR FILLER COLLAGENE
ÉCLAIRANT:	1. Stimulation 10 min. Pause 30" 2. Ph 21 5 minutes Pause 30" 3. Micro RAMPE 5 minutes Début du chauffage 4. Réchauffer 10 min.	CREMA GIORNO 21 MILA CREMA FIL & OR

8.2 Automatique Corps

CELLULITE MOLLE	1. Stimulation 20 MIN. Pause 30" 2. PH 21 200 Hz 5 MIN. Pause 30" 3. Microcourants sinusoïdaux 10 MIN. Début du chauffage 4. Réchauffer 10 MIN.	CREMA GRASSO + 50 CREMA GRASSO COMPATTO GEL CELLULITE L'ECCELLENZA
CELLULITE ŒDEMEUSE	1. Stimulation 20 MIN. Pause 30" Début du chauffage 2. Réchauffer 10 MIN.	GEL CELLULITE L'ECCELLENZA SIERO CORPO ATTIVATORE DELLA CIRCOLAZIONE 21 MILA FLUIDO COADIUVANTE
CELLULITE COMPACT	1. Stimulation 20 MIN. Pause 30" 2. Rampe de micro-courants 10 MIN. Début du chauffage 3. Réchauffer 10 MIN.	CREMA GRASSO COMPATTO GEL CELLULITE L'ECCELLENZA CREMA COMPATTANTE E RIDUCENTE 21 MILA


8.3 Exemples de position d'électrode corps

● ELETTRODO DI STIMOLAZIONE / STIMULATION ELECTRODE / ÉLECTRODE DE STIMULATION

8.3.1 Cellulite molle - Cellulite molle - Soft Cellulite

ARRIERE



AVANT

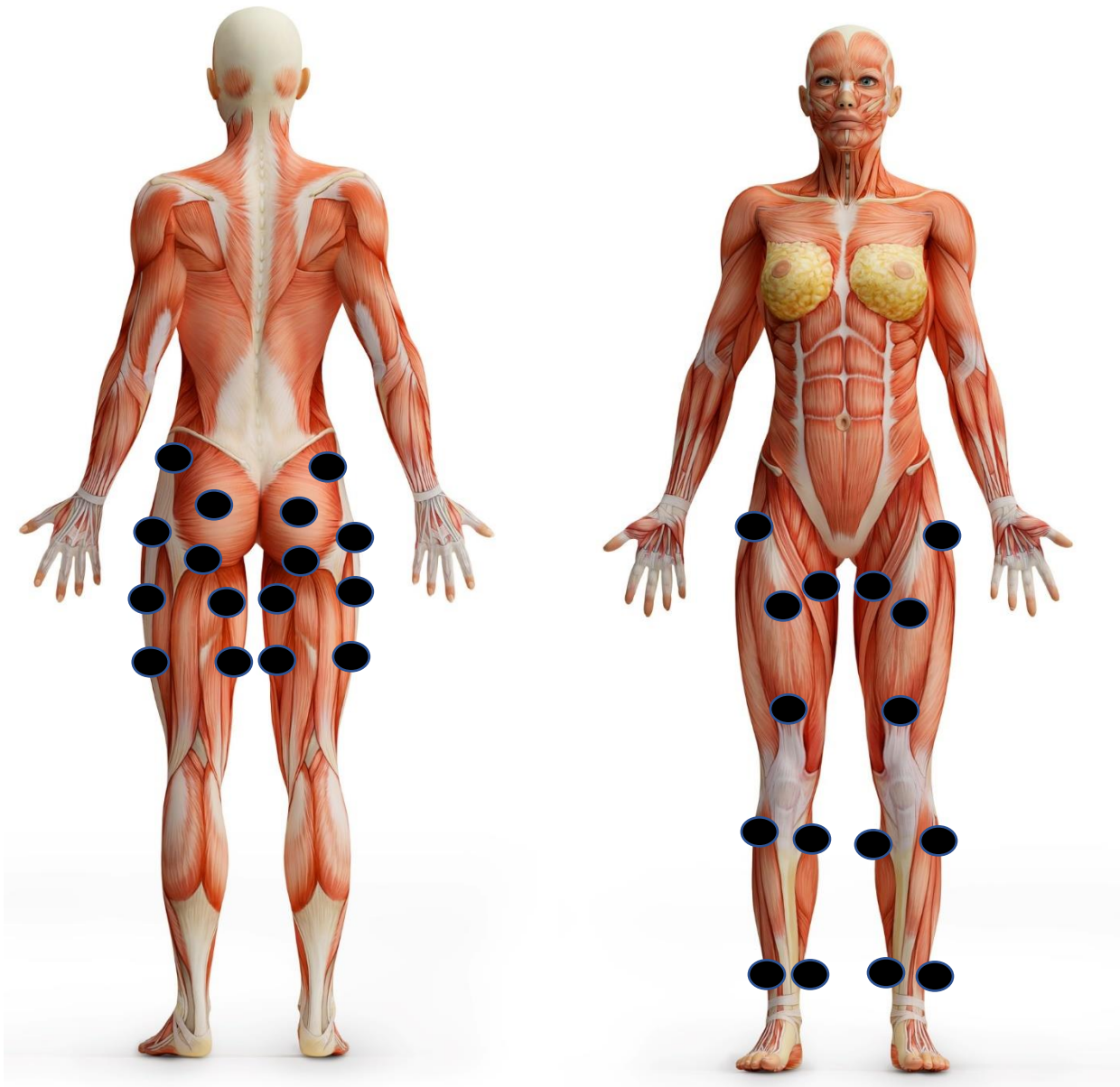

8.3.2 Cellulite edematosa - Cellulite oedémateuse - Oedematous cellulite

ARRIERE


AVANT

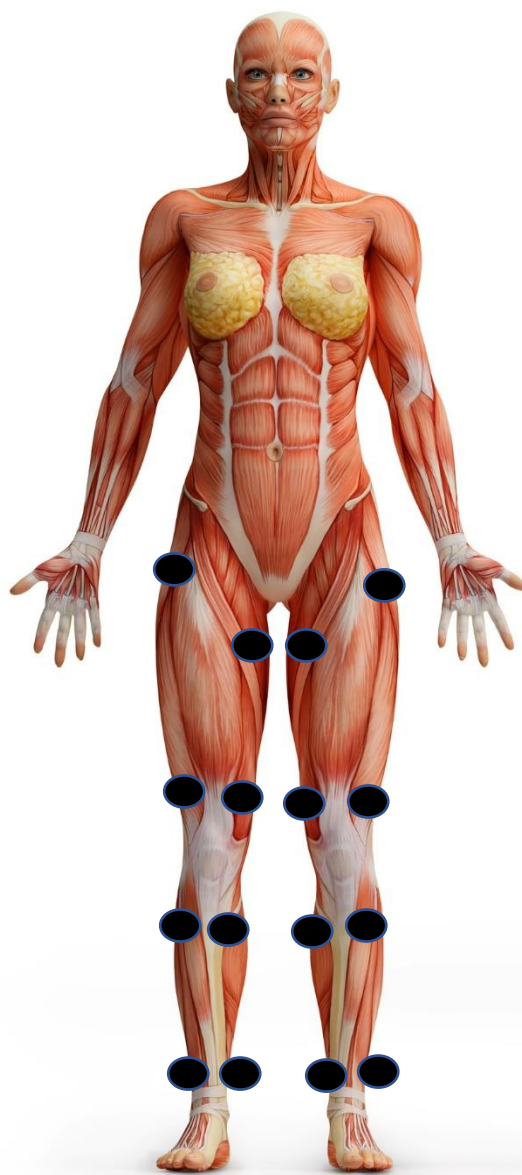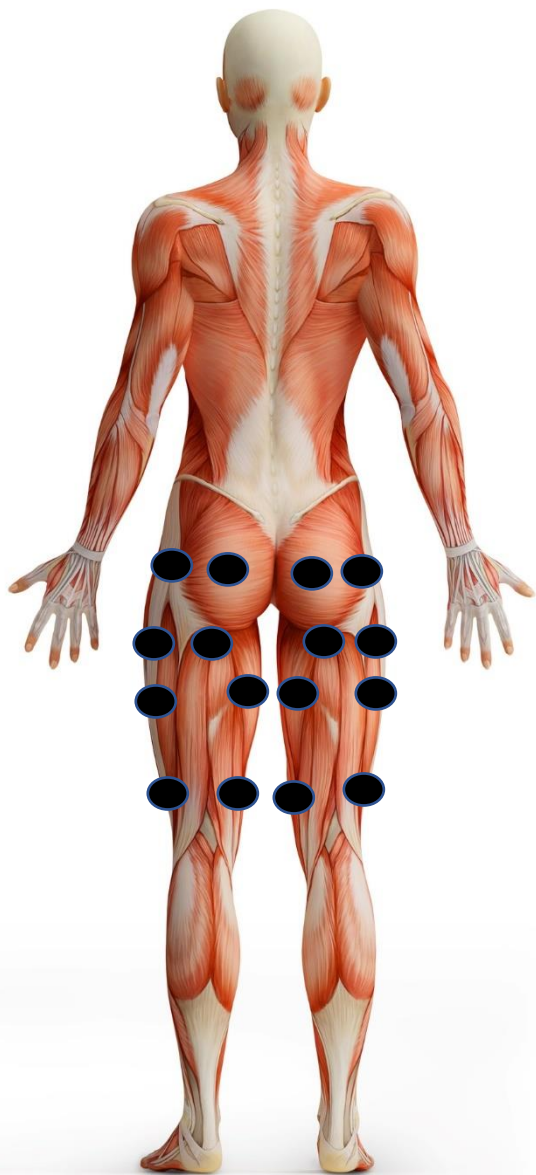

8.3.3 Cellulite Compatta - Cellulite Compact - Compact Cellulite

ARRIERE

AVANT

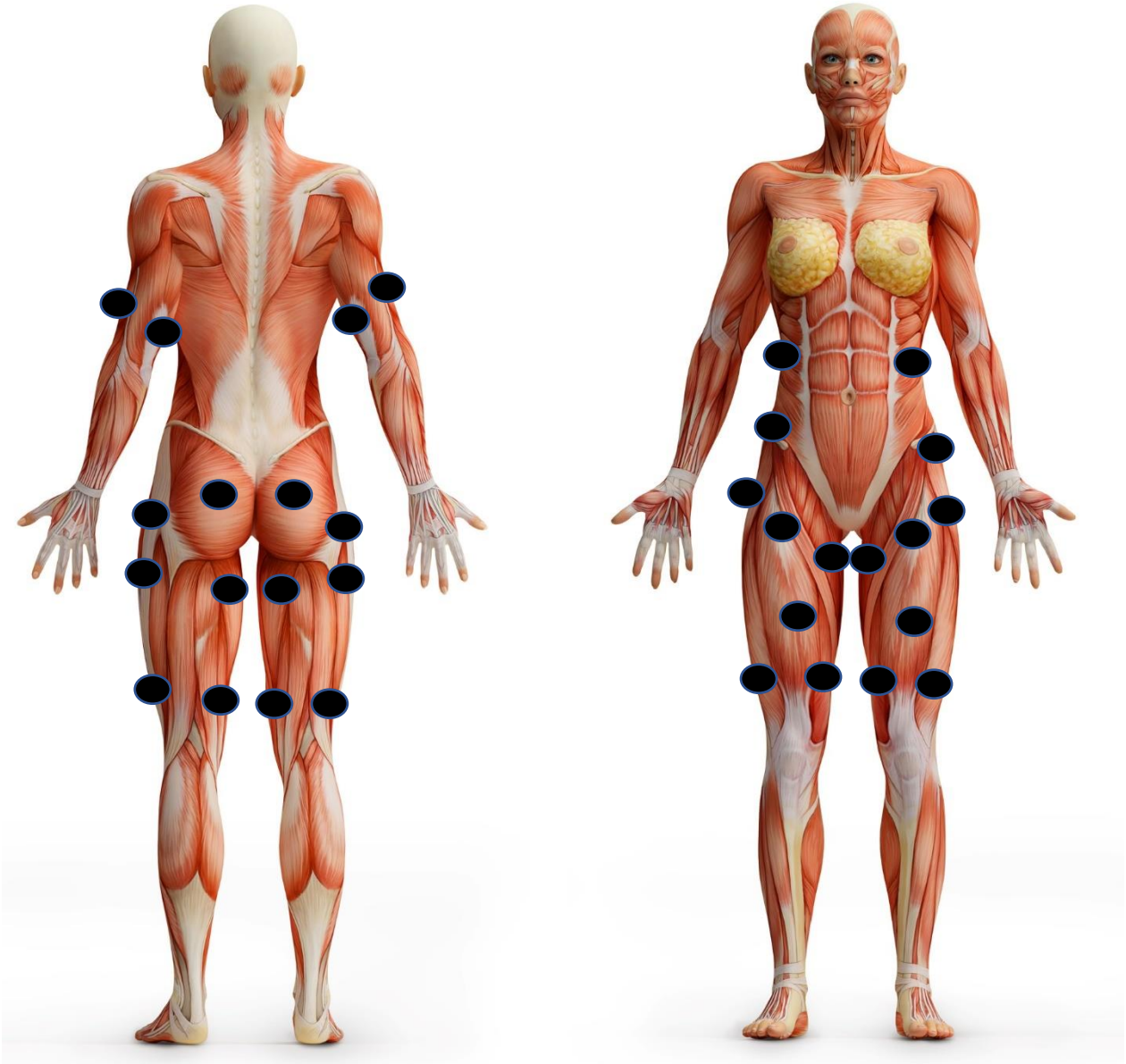

8.4 Exemples de position d'électrode visage

- ELETTRODO DI STIMOLAZIONE / STIMULATION ELECTRODE / ÉLECTRODE DE STIMULATION
- ELETTRODO DI STIMOLAZIONE / STIMULATION ELECTRODE / ÉLECTRODE DE STIMULATION

8.4.1 Lifting

8.4.2 Anti Età - Anti-âge - Anti-Age

8.4.3 Illuminante - Eclairant - Lighting




9 Élimination de l'appareil en fin de vie

L'appareil que vous avez acheté exige l'utilisation de matériaux et de substances particulières lors de sa production. Il peut contenir des substances dangereuses potentiellement néfastes pour l'environnement et pour la santé humaine s'il est rejeté dans l'environnement d'une façon inappropriée.

Lors de l'élimination de l'appareil, veuillez à tenir compte des lois européennes et nationales :

- Ne pas procéder à l'élimination de l'appareil comme un déchet urbain. Faites le tri sélectif en vous adressant à une entreprise spécialisée dans le tri des déchets électriques/électroniques ou aux administrations locales compétentes.
- Tenir compte des effets potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine dûs à la présence éventuelle de substances dangereuses dans les appareils électriques ou électroniques ou à une utilisation inappropriée de ces derniers. L'appareil est constitué de parties mécaniques métalliques et de matériaux plastic ainsi que de composants électriques et de cartes électroniques. Le producteur est à la disposition des utilisateurs qui souhaiteraient bénéficier d'informations supplémentaires concernant les substances dangereuses contenues dans l'appareil ainsi que sur les modalités de récupération et de recyclage de l'appareil.

Remarque : ce dispositif ne contient ni mercure ni amiante.

<p>Le sigle illustré sur cette image figure à l'extérieur de l'appareil et/ou sur l'emballage. Il mentionne l'obligation du tri des déchets des appareils électriques et électroniques en fin de vie.</p>	
---	---

Des sanctions sont prévues par la législation en vigueur pour les contrevenants.

10 Garantie

Le Fabricant garantira le bon fonctionnement des Produits pour une période de 24 mois à compter de la date de revente au client final ("Garantie"), étant entendu que:

1. la Garantie ne couvrira pas les éventuelles pannes imputables à l'usure normale, l'incurie, des manipulations et des modifications du Produit, un usage impropre et non conforme, des actes dolosifs, des défauts dérivant d'événements fortuits, du contact avec des liquides, d'un entretien effectué par un personnel non autorisé, ainsi que les dommages dérivant d'une détérioration durant le transport, de surtensions ou surintensités et/ou d'une alimentation électrique insuffisante ou irrégulière, de phénomènes atmosphériques et de catastrophes naturelles, ainsi que les pannes des composants électriques causées par des infiltrations de liquides, le feu, les décharges inductives/électrostatiques etc., et les dommages provoqués par des phénomènes ne relevant pas du fonctionnement normal du Produit, par l'inadéquation de l'environnement dans lequel il opère et/ou par toutes circonstances non causées par des défauts de fabrication;
2. la Garantie sera reconnue par le Fabricant après vérification de l'usage correct du Produit dans ses locaux de Turin; l'éventuel retour au Fabricant devra être préalablement autorisé par écrit par ce dernier suite à la bonne réception de la communication avec la dénonciation du vice observé;
3. dans tous les cas, les frais de transport seront toujours à la charge du Client;
4. seront exclus de la Garantie tous les accessoires présentant des défauts provoqués par des traumatismes (chutes, mauvaise utilisation), de sorte que même dans ce cas (comme dans tout autre cas où la Garantie ne serait pas appliquée) les frais de réparation seront facturés au Distributeur.



Produit et développé en Italie par

21 Equipment S.r.l.
Piazza Bodoni, 3 – 10123 Torino (TO) –Italie
Tel. +39 011 883522
Mail info@21equipment.com

